




*Kaksoiskouetteinen, resiinivahvistettu kalsiumsilikaatti pulpotomian hoitoon*

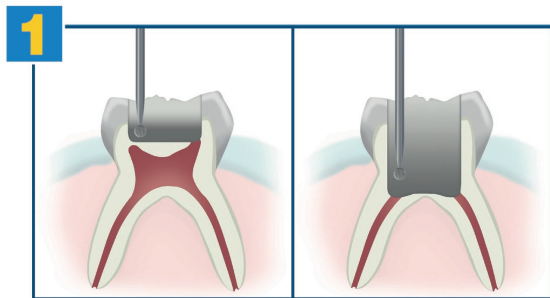


Pulpotomian hoito.

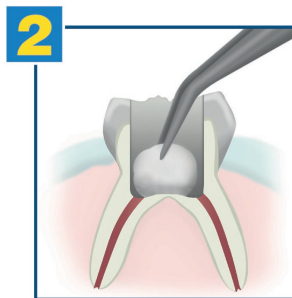

Hemostaasi.

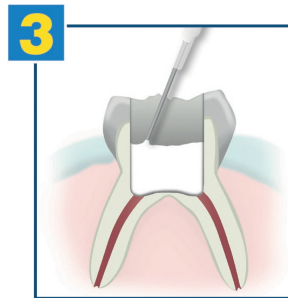

Vie TheraCal PT suoraan pulpakammioon ja varmista hyvä adaptoituminen kaviteetin seinämiin ja reunoihin.

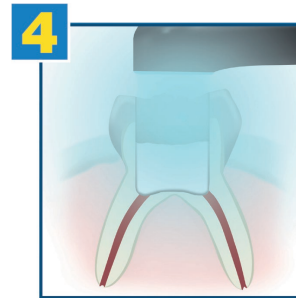

Valokoveta TheraCal PT 10 s. Vie haluttu sidosaine, alustäyteaine ja/tai täyte valmistajan ohjeiden mukaisesti.

## HAMMASVÄLINE

Asiakaspalvelu p. 010 588 6100  
kauppa.hammasvaline.fi | www.hammasvaline.fi



www.bisco.com