




*Kaksoiskovetteinen, itsesidostuva, kalsiumia luovuttava alustäyte/lineri*

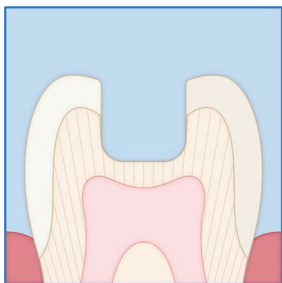


Valmistele kaviteetti.  
Ilmapuustaa 3-5 s ajan,  
jotta saat kaiken veden  
pois kaviteetin pinnalta.

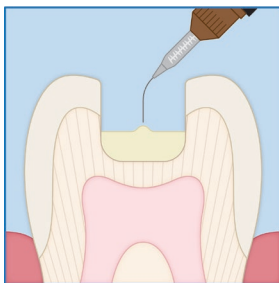


Applikoii TheraBase Ca  
dentiinin pinnoille  
suoraan ruiskusta.

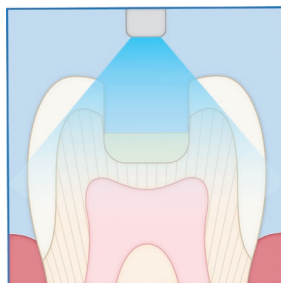

Valokoveta 20-30 se-  
kuntia tai anna kovettua  
itsestään (self-cure).

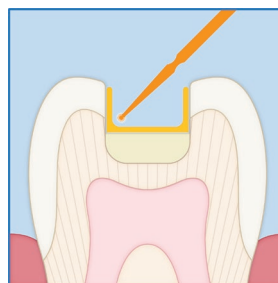

Applikoii sidosaine,  
esim. All-Bond Universal,  
valmistajan antamia  
käyttöohjeita  
noudattaen.

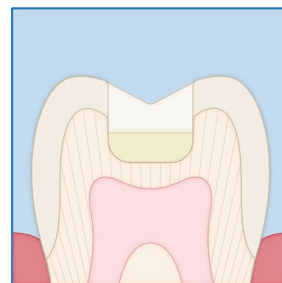

Tee ja viimeistele täyte  
valmistajan antamia  
käyttöohjeita  
noudattaen.

## HAMMASVÄLINE

Asiakaspalvelu p. 010 588 6100  
kauppa.hammasvaline.fi | www.hammasvaline.fi



www.bisco.com