

KÄYTTÖOHJE

LIPALLINEN SUOJAVISIIRI R5


HUOM! Visiiri suojaa vain roiskeilta.

Puhdista pyyhkimällä alkoholittomalla desinfektioaineella tai -liinalla.


tuotenumero: 301510

pakkaus: lippa, 5 kpl visiirejä, 5 kpl lipan kalvoa

valmistaja: LARIDENT

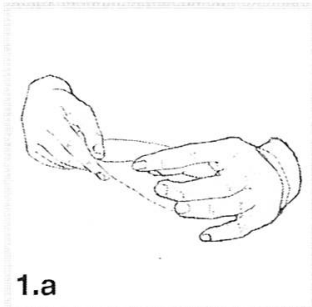


1.a

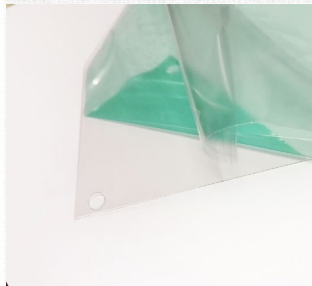


1

Poista suojakalvot visiirin molemmilta puolilta (väritön sekä vihreä suojakalvo)

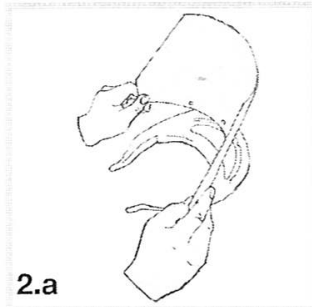


2.a

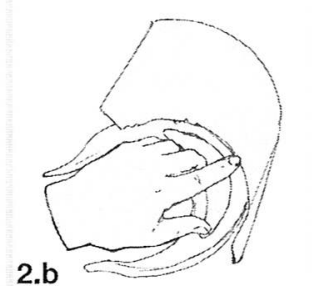


2.b

2

Käännä lippa ja aseta visiirikalvo lipan sisäpuolelle pienten valkoisten tappien väliin. Paina visiirin kaikki reijät kiinnitappeihin

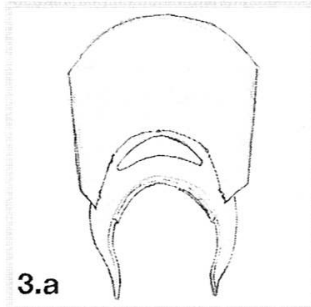


3.a

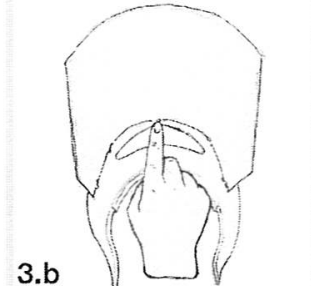


3.b

3

Paina visiiri keskeltä kiinni lipan runkoon kuvan osoittamalla tavalla.

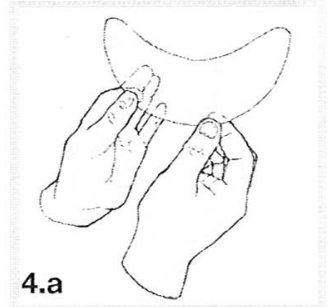

4.a

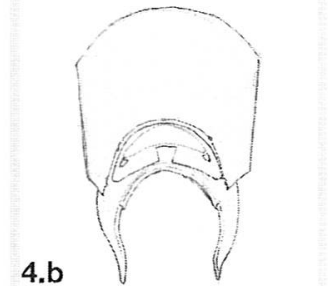

4.b

4

Ota pienempi kalvo ja paina se lipan etuosaan niin, että sivun siivekkeet jäävät lipan päälle kuvan osoittamalla tavalla



4.c

HAMMASVÄLINE