

EVIT TTDF

KÄYTTÖOHJE

- 1) Aseta testi-indikaattorin pidin pesukoriin. Määrittele sopiva sijainti pesusuihkujen suunnan, yms. tekijöiden mukaisesti. Käytä aina samaa paikkaa, siten huomaat pesutehossa ajan oloon tapahtuvat muutokset paremmin. Kiinnitä pidin tukevasti pesukoriin tms.
- 2) Poista EVIT-indikaattorisysteemi (=indikaattorilevy + testikotelo)
alumiinipakkauksestaan
ja aseta se pitimeen siten, että indikaattoritäplä jää näkyviin.
- 3) Aja normaali pesuohjelma (kuivauksineen jos kuivaus on)
- 4) Poista pidin korista, pura indikaattorisysteemi ja poista indikaattorilevy testikotelosta
- 5) Tarkastele levyyn jäävää testitäplää ja vertaa sitä ohjeeseen. Epäselvässä tapauksessa toista testi ja/tai muuta pesuohjelman parametreja.
- 6) Kuivaa indikaattorilevy ja arkistoi testitulokset osana laatudokumentointia.

EVIT TDF:n tulkinta



1. Alkuperäinen



2. Onnistunut testitulos



3. Pesuaine puuttuu, pesuainetta liian vähän tai pesuaine ei sovellu



4. Pesulämpötila liian alhainen tai tehoton vesisuihku



Clinichem Oy Ltd.

Hallitie 12

47400 Kausala

p. 05 381 8180

www.clinichem.fi