

Tuotetiedot

ID 220 porien desinfiointiaine



ID 220 yhdellä silmäyksellä

- Aldehyditon, käyttövalmis liuos pyörivien instrumenttien puhdistukseen ja desinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa hammaslääketieteen alalla.
- Poikkeuksellinen puhdistusteho – irrottaa pinttyneimmänkin liian alkalinekestävästä teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja kovametallista valmistetuista porista ja jyrsimistä, timantti-instrumenteista ja juurikanavainstrumenteista.
- Erityisen nopeatehoinen – vaikutusaika Fräsator-laitteessa vain 1 minuutti.
- Laaja vaikutusalue: Bakterisidinen, mykobakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, virusidinen (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV sekä koronavirukset ja vaipattomat virukset kuten adenovirukset, norovirukset, poliovirukset, polyomavirukset SV40).
- Testattu ajankohtaisten VAH-menettelmien, DVV/RKI-suositusten ja eurooppalaisten standardien mukaan.
- VAH-lista. Desinfiointiaineiden IHO-lista.
- Sopii erityisesti käyttöön ultraäänilaitteissa, kuten Hygasonic.
- Erinomainen yhteensopivuus materiaalien kanssa erityisten korroosioinhiittorien ansiosta.

Ominaisuudet

Dürr System-Hygiene -tuotesarjan ID 220 on erittäin tehokas, aldehyditon, käyttövalmis liuos pyörivien instrumenttien (alkalinekestävästä teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja kovametallista valmistetut porat ja jyrsimet, timantti-instrumentit, juurikanavainstrumentit) puhdistukseen ja desinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa hammaslääketieteen alalla. ID 220 -desinfiointiaineelle on ominaista erinomainen yhteensopivuus materiaalien kanssa erityisten korroosioinhiittorien ansiosta sekä erityisen nopea ja kattava teho. ID 220:n tuoksu on miellyttävä.

Koostumus

ID 220 sisältää alkoholiyhdistelmän, kaliumhydroksidia, kompleksinmuodostajia, korroosioinhiittoreita sekä apuaineita vesiliuoksessa. 100 g ID 220 -desinfiointiainetta sisältää 15 g 1-propanolia.

Mikrobiologinen teho

ID 220 on bakterisidinen, mykobakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, fungisidinen, virusidinen (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV sekä koronavirukset ja vaipattomat virukset kuten adenovirukset, norovirukset, poliovirukset, polyomavirukset SV40). ID 220 on VAH-listassa, desinfiointiaineiden IHO-listassa. Testattu suuressa kuormituksessa standardien EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 ja DVV/RKI-suositusten mukaan.

Käyttö

Käytä ID 220 -desinfiointiainetta aina laimentamattomana. Puhdistuksen vaikutusaika Fräsator-laitteessa on vain 1 minuutti ja ultraäänilaitteessa (esim. Dürr Dentalin Hygasonic) vain 30 sekuntia. Huuhtelet instrumentit puhdistuksen jälkeen perusteellisesti juoksevilla vedellä ja puhdista tarvittaessa käsin. Vaihda käytetty liuos työpäivittäin. Desinfioi puhdistetut pyörivät instrumentit sen jälkeen toisessa desinfiointilaitteessa ID 220 -tuotetta käyttäen. Vaikutusaika Fräsator-laitteessa on 1 minuutti. Katso taulukosta muita käyttöohjeita. Huuhtelet desinfioituja instrumentteja vaikutusajan jälkeen huolellisesti vähintään 15 sekuntia vähintään juomavesilaatuisella juoksevilla vedellä (mieluiten tislatulla vedellä) ja kuivaa. Desinfiointiainetta käyttäessä on likaisuudesta riippuen enintään 7 vuorokautta. Jos desinfiointiaineliuoksessa on näkyvää likaa, se on vaihdettava välittömästi. Noudata muun käsittelyn sekä mahdollisesti tarvittavan steriloinnin osalta valmistajan antamia ohjeita sekä maakohtaisia määräyksiä.

Ympäristövaikutukset

Polyteenistä ja polypropeenista valmistetun pakkauksen materiaalin voi lämpökierrättää. Pullo on huuhdeltava vedellä ennen kierrätystä. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteista.

Fysikaaliset ominaisuudet

Ulkonäkö: kirkas, vaaleansininen liuos
Tiheys: $D = 0,99 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)
pH-arvo: $13,4 \pm 0,5$

Valmisteitamme koskevat suositukset perustuvat perusteellisiin sisäisiin ja ulkoisiin tieteellisiin tutkimuksiin, ja suositukset annetaan parhaaseen tietoomme perustuen. Tuotevastuamme käy ilmi yleisistä myyntiehdostamme, jotka voi tilata yrityksestämme aina tarvittaessa.



Tuotetiedot

ID 220 porien desinfiointiaine

Säilyvyys

3 vuotta.

Käytetyt puhdistusaineet vaihdetaan työpäivittäin, desinfiointiaineet likaisuudesta riippuen, käyttöaika enintään 7 vrk. Jos desinfiointiaineluoksessa on näkyvää likaa, se on vaihdettava välittömästi.

Pakkauskoko

2,5 l:n pullo

Säilytys

Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.

Tarvikkeet

Hygasonic

Yleisiä ohjeita

Käytä ID 220 -desinfiointiainetta Fräsator-laitteessa. ID 220 -tuotetta ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Emäkselle ja alkoholille arkoja materiaaleja, kuten kevyt- ja kirjometalleja, esim. alumiinia ja messinkiä tai tiettyjä synteettisellä hartsilla liimattuja instrumentteja ei saa asettaa ID 220 -liuokseen. Suosittelemme siihen instrumenttien desinfiointiainetta ID 212, ID 212 forte tai ID 213. Kovametallista valmistettujen porien ja jyrsinten, värikoodatulla kah-

valla varustettujen juurikanavainstrumenttien ja keraamisten hiomalaikkojen yhteensopivuus ID 220 -aineen kanssa on tarkastettava. Porat ja jyrsimet voivat olla enintään 12 tuntia ID 220 -desinfiointiaineessa. Noudata instrumenttien valmistajan antamia tietoja materiaalien yhteensopivuudesta, hoidosta ja uudelleen käsittelystä. Kontaminoituneiden instrumenttien puhdistukseen suosittelemme entsymaattista instrumenttien puhdistusainetta ID 215. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia erityisesti säilytettäessä tuotetta aurin-gonvalossa. Näillä väri- ja hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfiointitehoon. Vain ammattikäyttöön. Kaikista tämän tuotteen yhteydessä ilmenevistä vakavista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava valmistajalle ja jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Varoitukset

ID 220 on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti: katso tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.

Riippumattomat lausunnot – omat tutkimukset

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä.

CE 0124

Käyttö		Pitoisuus-aika-suhde
Käyttösuositus instrumenttien desinfiointiin VAH:n mukaisesti	bakterisidinen / hiivasieniä tuhoava / tuberkulosidinen / fungisidinen	100 % - 1 min
Vaikutusspektri		Pitoisuus-aika-suhde
Bakteerit / hiivasienet / homesienet		
bakterisidinen / hiivasieniä tuhoava / fungisidinen	EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562	100 % - 1 min
bakterisidinen / hiivasieniä tuhoava / fungisidinen ultraäänilaitteessa	EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562	100 % - 30 sekuntia
mykobakterisidinen / tuberkulosidinen	EN 14348, EN 14563	100 % - 1 min
Virukset		
Rajoitetusti virusidinen	EN 14476, EN 17111	100 % - 1 min
(vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV ja koronavirukset)	DVV/RKI-suositus	100 % - 15 sekuntia
Adenovirukset	EN 14476, EN 17111	100 % - 1 min
	DVV/RKI-suositus	100 % - 1 min
Norovirukset	EN 14476, EN 17111	100 % - 1 min
	DVV/RKI-suositus	100 % - 1 min
Poliovirukset	EN 14476	100 % - 1 min
	DVV/RKI-suositus	100 % - 1 min
Polyoomavirukset SV40	DVV/RKI-suositus	100 % - 30 sekuntia

Myynti

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Saksa
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Valmistaja

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Saksa
www.orochemie.de
info@orochemie.de

