

HELIX-TESTI PCD

OHJEET

1. Avaa Helix Test PCD -testilaite ja irrota korkki kapselista.
2. Taita testiliuska viillon kohdalta. Musteindikaattori on käännettävä sisäänpäin.
3. Aseta taitettu testiliuska kapseliin. Työnnä indikaattori kapselin pohjaan asti **taitekohta** edellä. Testitulokset voivat vääristyä, jos testiliuska on asetettu väärin.
4. Sulje Teflon[®] -putki. Kierrä kapselin korkki käsin kiinni.
5. Aseta testilaite autoklaaviin kylmimpään paikkaan (lähelle ovea tai lauhdeveden poistoaukkoa) ja käynnistä ohjelma. Sterilointiin tarvittavat parametrit musteen värinmuutosilmaisimen saamiseksi ovat:
134 °C kyllästetty höyry: 3,5 minuuttia
121 °C kyllästetty höyry: 15 minuuttia
6. Ohjelman loputtua, poista testilaite autoklaavista ja odota minuutti ennen kuin avaat kapselin korkin. Testilaite saattaa olla kuuma. Avaa kapselin korkki ja poista indikaattori kapselista. Lue tulos.
7. Kun laitteen sisällä oleva ilma on poistettu tehokkaasti, kyllästetty höyry on tunkeutunut putken sisään, kunnes se saavuttaa kammion ja 134 °C:n lämpötilan (3,5 minuuttia) tai vaihtoehtoisesti: 121 °C 15 minuuttia. Musteindikaattori muuttuu keltaisesta mustaksi, mikä osoittaa, että kaikki sterilointiparametrit on täytetty.

HELIX TEST SYSTEM noudattaa standardeja: EN 867-5 / ISO 11140-1 Type 6



E.C.S. S.r.l. Via Como n. 71 - 23883 Brivio (LC) – Tel. 0341/681602 Fax 0341/605485 Email: info@ecssrl.com REV.3