

THERACAL PT

Kaksoiskovetteinen, resiini- vahuistettu kalsiumsilikaatti pulpotomiaan

*TheraCal PT on bioyhteesopiava, kaksoiskovetteinen, resiini-
vahuistettu kalsiumsilikaatti paljastuneen dentiinin
hoitoon. TheraCal PT suojaa pulpaa ja säilyttää hampaan
vitaliteetin. TheraCal PT:n kyky luovuttaa kalsiumia
ja emäksinen pH mahdollistaa sen
käytön syvissä kaviteeteissa.
Kaksoiskovetteisuus mahdollistaa
välittömän restoratiivisen
materiaalin viennin.*



KÄYTTÖ

Pulpotomiat | voidaan viedä osittaisen tai kokonaisen koronaalisen pulpan poiston jälkeen.

TheraCal PT:tä voidaan käyttää myös

- Paljastuneen pulpan hoitoon (suora pulpan kattaminen). Voidaan viedä suoraan paljastuneen pulpan päälle, kun hemostaasi on saavutettu.
- Suojaavana linerina (epäsuora pulpan kattaminen) tai basemateriaalina useiden materiaalien alle.

AINUTLAATUISET EDUT

- Sisältää synteettisiä Portland-sementtikalsiumsilikaattipartikkeleita hydrofilisessä matriksissa, mikä aikaansaa kalsiumin luovutuksen. *
- Fysikaaliset ominaisuudet estävät sen murtumisen ja hajoamisen aikaansaaden kestäväen suojan. *
- Emäksinen pH säilyttää pulpan vitaliteetin.
- Kestää kosteutta, alhainen vesiliukoisuus. *
- Helppo aplikointi ruiskusta.
- Ei käsinsekoitusta. Helppo ja suora annostelu kaksoisruiskusta (4 g).
- Röntgenkontrasti. Röntgenopaakkina se on helppo tunnistaa ja erottaa uusiutuneesta karieksesta ja muista restoratiivisista materiaaleista.

PAKKAUSKOOT

tuotenro

302735

THERACAL PT -automix-ruisku, 4 g


302738

THERACAL PT -vientikärjet, 30 kpl


valmistajan koodi

H-34110P


X-81270P

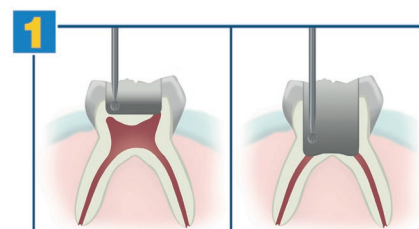


1. Pulpotomian hoito.

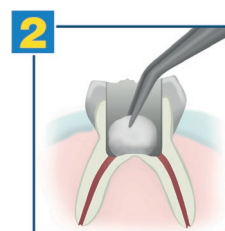

2. Hemostaasi

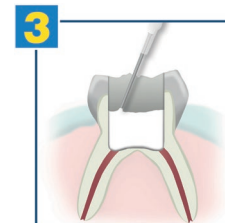

3. Vie TheraCal PT suoraan pulpa-kammioon ja varmista hyvä adaptoituminen kaviteetin seinämiin ja reunoihin.

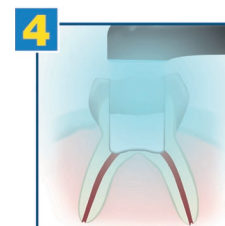

4. Valokoveta 10 s. Vie haluttu sidosa-aine, alustäyte-aine ja/tai täyte valmistajan ohjeiden mukaisesti.