

DENTOSEPT CLEAN

Dentosept® Clean on tarkoitettu hoitoveden laadun ylläpitoon ja vesikanavien desinfiointiin Dentsply Sirona -hammashoitoyksiköissä.


Käyttötarkoitus:

Hoitovedessä olevien taudinaiheuttajien kasvun ja määrän vähentäminen tasaisella Dentosept Clean -desinfektioaineen annostelulla, sekä vesikanavien desinfiointi laimentamattomalla Dentosept Clean -desinfektioaineella vähintään 24 tunnin ajan.



SIRONA INTEGRO

Lisätään raikasvesipulloon 100 % liuoksena 0,4–0,5 l ja tehdään instrumenttiletujen desinfiointi kerran kuukaudessa.

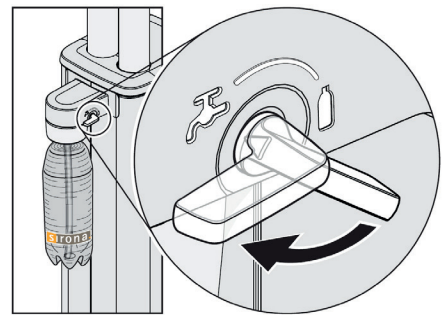

SIRONA INTEGRO Pro | SINIUS | TENEO

Kaada pullon sisältö hoitokoneen säiliöön. Hoitokone annostelee jatkuvasti 2 % liuosta, minkä lisäksi tehdään kerran kuukaudessa SAN-ohjelman kautta automaattisesti 100 % liuoksella.

