



UltraSeal XT™ hydro™

HYDROFIILINEN UURRE- JA FISSUURAPINNOITE




Inspiral™ Brush -kärki

- Se on hydrofiilinen ennen kovetusta, hydrofobinen kovetuksen jälkeen sekä itsekiinnittyvä
- Edistysellinen sidosteknologia
- Fluoresointi mustavalossa auttaa varmistamaan, että pinnoite on yhä paikallaan
- Filleripitoinen resini – 53 %
- Tiksotrooppinen / ihanteellinen juoksevuus
- Kaksi sävyä: Opaque White ja Natural


UltraSeal XT hydro hydrofiilinen uurre- ja fissuurapinnoite on valokovetteinen, radiopaakki, fluorida sisältävä yhdistelmämuovipinnoite. Se on vahvempi ja kulutuskestävämpi, sillä se sisältää 53 % resiniä, ja sen kovettumiskutistuminen on vähäisempää kuin kilpailevien tuotteiden. Inspiral™ Brush -kärjellä käytetyn UltraSeal XT hydro -pinnoitteen tiksotrooppinen koostumus ohenee itsestään kärjestä pursottaessa – siten se pääsee tunkeutumaan syvälle uurteisiin ja fissuuriin. Resiini jähmettyy, kun pinnoitteen oheneminen päättyy ja applikointi on valmis, mikä estää resiniin valumisen ennen valokovettamista. Pitkälle kehitetty hydrofiilinen koostumus toimii kaiken näkyvän kosteuden poistamisen jälkeen. UltraSeal XT hydro -pinnoite sietää paremmin syvällä uurteissa ja fissuuroissa olevaa kosteutta.

ENNEN JA JÄLKEEN


Courtesy of Dr. Jateena Jessop.

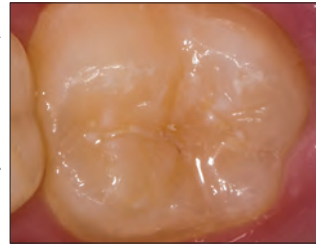

Ennen.

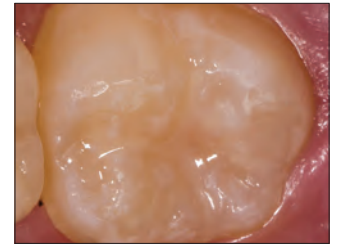

Jälkeen.

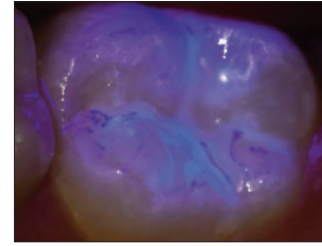

Reunojen ja retention tarkastaminen on usein vaikeaa pinnoitteen annostelun jälkeen. UltraSeal XT™ hydro -pinnoitteen fluoresenssiominaisuudet ovat ratkaisu tähän ongelmaan. Fluoresenssiominaisuuden ansiosta hampaan pinnoitteen tiiviiden voi tarkastaa mustavalolla annostelun aikana ja seuraavilla käynneillä.

NELJÄ YKSINKERTAISTA VAIHETTA



1. Etsää 30 sekuntia prepaarimattomassa kiilteessä, 15 sekuntia prepaaroidussa kiilteessä. Huuhtelee.



2. Poista näkyvä kosteus.



3. Annostele UltraSeal XT hydro -pinnoite.




4. Valokoveta 3 sekuntia VALO™ LED-valokovettajan Xtra Power -tilalla tai 10 sekuntia Standard-teholla.




REUNOJEN RETENTIO JA MIKROVUODOT

UltraSeal XT hydro -pinnoite

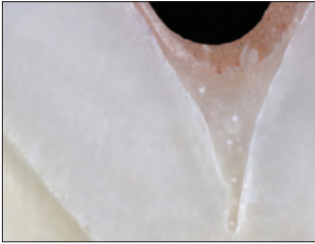


Ei mikrovuotoa.

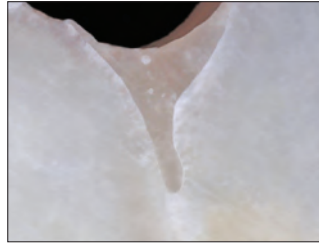


Suojatut reunat.

Kilpaileva hydrofiilinen pinnoite

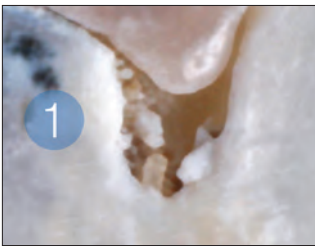

Mikrovuoto.

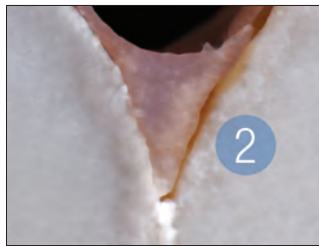

Irtoaminen reunoilta.



UltraSeal XT hydro -pakkausset

Sävy	Pakkaus
Opaque White	3532
Natural	3533

1 kpl 1,2 ml:n (2,04 g) UltraSeal XT hydro -ruisku

1 kpl 1,2 ml:n (1,58 g) Ultra-Etch-ruisku

20 kpl Blue Micro -kärkiä

20 kpl Inspirial Brush -kärkiä




UltraSeal XT hydro -täyttöpakkaukset

Sävy	4 kpl/pakkaus	20 kpl/pakkaus
Opaque White	3534	3536
Natural	3535	—


1,2 ml:n ruiskut (2,04 g)



35551 – Black Light -avaimenperä 1 kpl/pakkaus

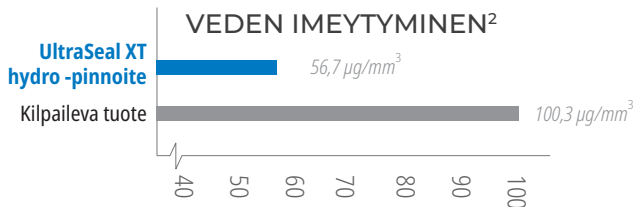

Tasapainoinen veden imeytyminen mahdollistaa paremman siedon kosteissa ympäristöissä ilman hajoamista.

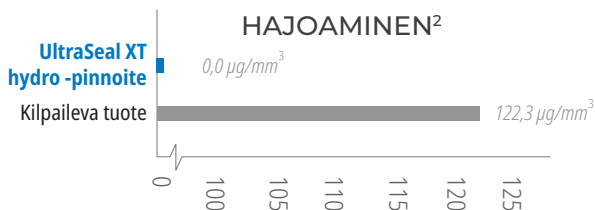

Ei hajoamista tasapainoisen veden imeytymisen ansiosta.

1. realityesthetics.com 2. Tiedot arkistossa.