




## UltraSeal XT™ plus



HYDROFOBINEN UURRE- JA FISSUURAPINNOITE

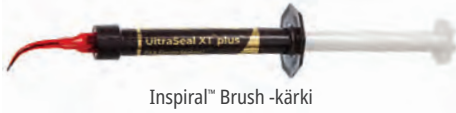

Inspiral™ Brush -kärki

- Erinomainen retentio<sup>2</sup>
- Suora annostelu vaikeapääsuisille alueille
- Kuplaton, valumaton vienti
- Korkea reunojen retentio estää mikrovuodon
- Tunkeutuu syvimpiin uurteisiin ja fissuroihin
- Tiksotrooppinen / ihanteellinen juoksevuus
- Neljä sävyä: Opaque White, Clear, A1 ja A2

UltraSeal XT plus hydrofobinen uurre- ja fissuurapinnoite on valokoveteinen, radiopaakki, fluoridia vapauttava yhdistelmämuovipinnoite. Se on vahvempi ja kulutuskestävämpi, sillä se sisältää 58 % resiniä, ja sen kovettumiskutistuminen on vähäisempää kuin kilpailevien tuotteiden. Inspiral™ Brush -kärjellä käytetyn UltraSeal XT plus -pinnoitteen tiksotrooppinen koostumus ohenee itsestään kärjestä pursottaessa – siten se pääsee tunkeutumaan syväle uurteisiin ja fissuroihin. Resiini jähmettyy, kun pinnoitteen oheneminen päättyy ja applikointi on valmis, mikä estää resiniin valumisen ennen valokovettamista. PrimaDry™-kuivausaineen käyttäminen yhdessä UltraSeal XT plus -pinnoitteen kanssa parantaa tunkeutumista uurteisiin ja fissuroihin<sup>3</sup>, sillä se poistaa hydrofobisten pinnoitteiden vaikutusta mahdollisesti heikentävää kosteutta.

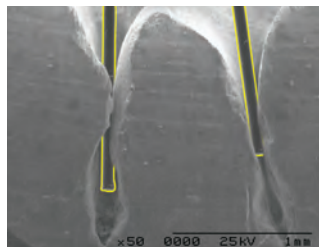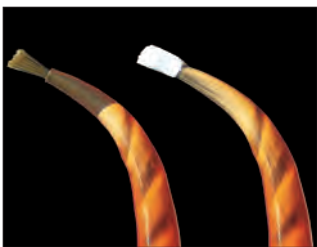

Säädettävien kuitujen ja kierteisen kanavansa ansiosta Inspiral™ Brush -kärki sopii erinomaisesti UltraSeal XT -pinnoitteiden annosteluun.  
Harjasten ja hampaan (oikealla) kuvat otettiin samalla suurennoksella ja asetettiin sitten päällekkäin.

\*Reality-arvioinnit. Reality. Reality Publishing Company 1998–2017. 1. realityesthetics.com. 2. Boksmann L, Carson B. Two-year retention and caries rate of UltraSeal XT and Fluorshield light-cured pit and fissure sealants. *Gen Dent.* 1998;46(2):184-7.

## PINNOITTEIDEN YKKÖNEN vuodesta 1998 lähtien!\*

### ENNEN JA JÄLKEEN



Ennen.



UltraSeal XT plus -pinnoitteen jälkeen.




Ennen.



UltraSeal XT plus -pinnoitteen jälkeen.

### VIISI YKSINKERTAISTA VAIHETTA

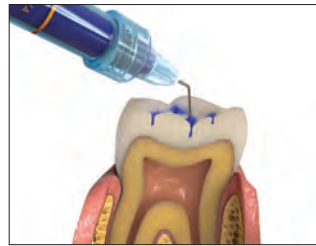

1. Etsää 30 sekuntia preparaioimattomassa kiilteessä, 15 sekuntia preparoidussa kiilteessä. Huuhtele.



2. Poista näkyvä kosteus. PrimaDry™-kuivausaine kuivaa.



3. Applikoi PrimaDry-ainetta 5 sekuntia Black Micro™ FX™ -kärjellä ja kuivaa ilmalla.




4. Aseta UltraSeal XT plus -pinnoite.



5. Valokoveta 3 sekuntia VALO™-valokovettajan Xtra Power™-tilalla tai 10 sekuntia Standard-teholla.




## FYYSISET OMINAISUUKSIEN VERTAILU SIDOSLUJUUS<sup>1</sup>

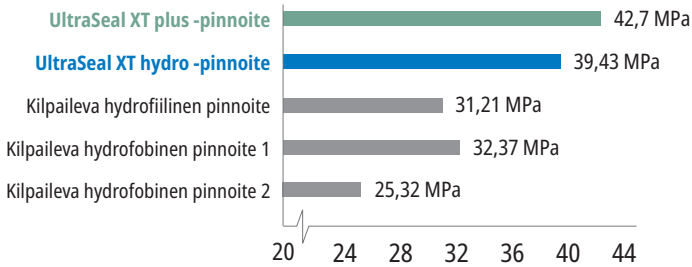


Korkea sidoslujuus on tärkeää pinnoitteen ylläpitämiseksi normaalissa käytössä.

## KOVUUS<sup>1</sup>

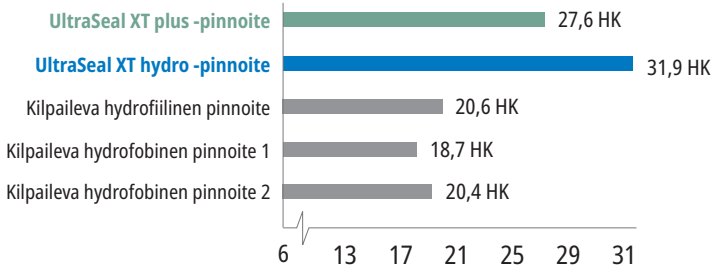

Korkea kovuus merkitsee voimakasta ja kestävä pinnoitetta, joka ei hajoa eikä kulu.

## KUTISTUMINEN<sup>1</sup>

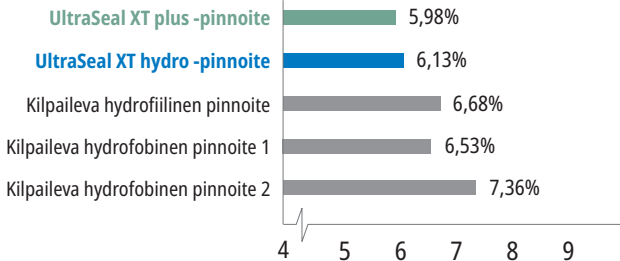

Vähäinen kutistuminen vähentää vaaraa reunoille jäävistä aukoista, jotka voivat johtaa mikrovuotoon.

1. Tiedot arkistossa.

**PrimaDry™**  
KUIVAUSAINE



- Käyttö UltraSeal XT plus uurre- ja fissuurapinnoitteen kanssa
- Vähentää mikrovuotoa hydrofobisissa pinnoitteissa

PrimaDry-kuivausaine sopii optimaalisesti uurteen ja fissuuran kuivaukseen sekä käyttöön ennen hydrofobisten pinnoitteiden asettamista. Se sisältää 99 % orgaanisia liuottimia ja 1 % primeriä. PrimaDry-kuivausaine haihduttaa nopeasti kosteuden uurteesta ja fissuurasta, kun etsausaine on huuhdeltu vesisuihkulla ja uurre tai fissuura kuivattu ilmapuustilla. Ohuen primerikalvon ansiosta UltraSeal XT™ plus -uurre- ja fissuurapinnoite virtaa täydellisesti kaikkiin urteisiin ja fissuuroihin. Älä käytä dentiinille.



### UltraSeal XT plus -pakkaukset

Sävy	Pakkaus
Opaque White	725
Clear	563
A1	1286
A2	733

- 1 kpl 1,2 ml:n (2,04 g) UltraSeal XT plus -ruisku
- 1 kpl 1,2 ml:n (1,58 g) Ultra-Etch-ruisku
- 2 kpl 1,2 ml:n (0,95 g) PrimaDry-ruiskuja
- 10 kpl Blue Micro -kärkiä
- 10 kpl Black Micro FX -kärkiä
- 20 kpl Inspiral Brush -kärkiä



### UltraSeal XT plus -täyttöpakkaukset

Sävy	4 kpl/pakkaus	20 kpl/pakkaus
Opaque White	726	727
Clear	565	—
A1	1289	—
A2	734	—

1,2 ml:n (2,04 g) ruiskuja



Black Micro™ FX™ -kärki

SÄILYTÄ JÄÄKAAPISSA



**716 – PrimaDry Syringe -täyttöpakkaus**  
4 x 1,2 ml:n (0,95 g) ruiskuja

**717 – PrimaDry Syringe -säätötäyttöpakkaus**  
20 x 1,2 ml:n (0,95 g) ruiskuja