

(FI) Tuotekuvaus: Canasol on vesipohjainen natriumhypokloriittiliuos. Laimeina annoksina poistaa lähinnä kuollutta kudosta, suurempina pitoisuuksina myös eläviä soluja. **Toimenpide:** Sitä käytetään endodonttisten toimenpiteiden aikana juurikanavien huuhteluun ja puhdistukseen. Poista porausjätekerros sopivalla huuhtelu-aineella, kuten EDTA-liuoksella tai 12,5% sitruunahapolla. **Käyttö:** 1. Valitse sopivankokoinen ruisku (10 ml) ja huuhteluneula. 2. Täytä ruisku Canasol hypokloriittiliuoksella ja kiinnitä ruiskuun huuhteluneula. 3. Vie neula juurikanavaan ja huuhtelee tarpeen mukaan. 4. Irrota ruisku ja huuhteluneula ja heitä ne pois. **Turvallisuusohjeet:** 1. Lue materiaalin käsittelyohjeet ja turvallisuustiedot tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. 2. Juurikanavaa huuhdottaessa liuosta ei saa painaa periapikaalisiin kudoksiin. 3. Vältä liuoksen joutumista ympäröiviin kudoksiin. 4. Vältä liuoksen joutumista vaatteille: Canasol on lievästi emäksinen ja sillä on haalistava vaikutus. **Varoitukset:** 1. Varoitus, syövyttävä! 2. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 3. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. 4. Ei saa injektoida eikä niellä. 5. Vältä Canasolia sekoittamista CHX:n kanssa. **Varastointi:** Säilytettävä kuivassa, kuumudelta ja suoralta auringonvalolta suojattuna.