

(FI) Tuotekuvaus: CHX Endo 2% on klooriheksidiiniglukonaattiliuos. Se on tarkoitettu juurikanavien huuhteluun ja puhdistamiseen. Poista smear layer sopivalla huuhtelunesteellä, kuten EDTA-liuoksella tai sitruunahapolla (12,5%). Vain hammaslääketieteelliseen käyttöön. **Käyttöohje:** 1. Käytä 17% EDTA liuosta esihuuhteluun poistaaksesi kanavasta smear layerin. 2. Huuhtelee Canasol (NaOCl) hypokloriittiliuoksella. 3. Huuhtelee hypokloriitti pois steriilillä vedellä tai anestisella liuoksella. 4. Täytä huuhteluruisku CHX Endo 2%-liuoksella (suositeltava määrä 10 ml). 5. Huuhtelee yhtäjaksoisesti vähintään 2 minuuttia (suositeltava määrä 10-20 ml). 6. Irrota ruisku ja huuhteluneula ja heitä ne pois. **Varotoimenpiteet:** 1. Lue materiaalin käsittelyohjeet ja turvallisuustiedot tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. 2. Juurikanavaa huuhdottaessa liuosta ei saa painaa peripikaalisiin kudoksiin. 3. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. **Varoitukset:** 1. Klooriheksidiiniä sisältäviä tuotteita ei saa sekoittaa natriumhypokloriittia sisältäviin tuotteisiin, jotta estetään punaruskean heikosti liukenevan sakan muodostuminen. 2. Säilytä poissa lasten ulottuvilta. 3. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. **Varastointi:** Säilytys kuivassa ja viileässä, kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta suojattuna.