

PANAVIA™ V5



YKSI SEMENTTI KAIKKEEN SEMENTOINTIIN . YKSI ESIKÄSITTELYMENETELMÄ.

PANAVIA™ V5 sementti soveltuu kaikkiin sementoinnin indikaatioihin ja kaikille materiaaleille. PANAVIA™ V5:tä käytettäessä ainutlaatuisen yksinkertainen menetelmä yllättää vaivattomuudellaan. Sementointi toteutetaan aina seuraavasti: hammaskudos esikäsitellään PANAVIA™ V5 Tooth Primerilla ja restauroatio CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUSilla.

PANAVIA™ V5 on lujin saatavilla oleva sementti, jonka viisi väri vaihtoehtoa takaavat esteettisen lopputuloksen. Amiiniton pasta tekee PANAVIA™ V5 stä kestävämmän ja varmistaa, sen sävyjen pysyvyyden.

PANAVIA™ V5:N SALAISUUS

Kuraray Noritake Dentalin valmistama alkuperäinen ja puhtain MDP-monomeeri saa aikaan edelleen kestävämmän kiinnittymisen hydroksiapatiittiin (HAp), mutta se sidostuu vahvasti myös metalliin ja zirkoniaan. PANAVIA™ V5 Tooth Primerin ja CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUSin sisältämä MDP-monomeeri varmistaa poikkeuksellisen sidoslajuuden. Tämä on yksi PANAVIA™ V5:n erinomaisen toimivuuden salaisuuksista!



INDIKAATIOT

Soveltuu käytettäväksi seuraavissa tapauksissa:

- Kruunujen, siltojen, inlay- ja onlay-täytteiden sementointi
- Laminaattien sementointi
- Siltojen ja splinttien sementointi
- Proteesirestaatioiden sementointi implanttitukiin ja runkoihin
- Nastojen ja pilareiden sementointi
- Amalgaamin sidostaminen

OMINAISUUDET

- Kaksoiskovetteinen:
- Automix-ruisku
- 5 väri vaihtoehtoa
- Vapauttaa fluoridia
- Amiiniton
- Ylijäämien helppo poisto
- Säilyy 3 vuotta

ENNAKOITAVAT MENETELMÄT¹

Restaaraatiosta, materiaalista ja indikaatiosta riippumatta menetelmä on aina sama:

1. Applikoi CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS restaaraation kiinnityspinoille
2. Applikoi PANAVIA™ V5 Tooth Primer hammaskudokseen.
3. Applikoi PANAVIA™ V5 restaaraation kiinnityspinoille ja aseta paikalleen.



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS on yleispraimerimeri kaikkien keraamisten, yhdistelmämuovisten ja metallisten restaaraatioiden sidostamiseen.



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER

PANAVIA™ V5 Tooth Primer muodostaa sidoksen hammaskudokseen ja kovettaa sementtipastan. Näin se toimii: alkuperäiset MDP-monomeerit sidostuvat kiilteeseen ja dentiiniin, ja sementin kovettuminen kiihtyy välittömästi sen koskettaessa PANAVIA™ V5 Tooth Primeria. Tämä kosketuskovetuksenakin tunnettu mekanismi saa aikaan erittäin tehokkaan polymerisaation ja takaa parhaan mahdollisen sidoslajuuden.

VIISI VÄRIVAIHTOEHTOA²

Kaksoiskovetteinen:

Universal (A2)

Clear

Brown (A4)

White

Itsekovetteinen:

Opaque



¹ Käyttöohjeissa on selkeät ja yksinkertaiset ohjeet esikäsitteilyluoksen oikeasta applikoinnista ja vaadittavasta valon voimakkuudesta.

² Painotekniikka saattaa vääristää pastojen todellisia värejä.

PANAVIA™ V5



TILAUSTIEDOT

TUOTENUMERO	TUOTTEEN NIMI	TUOTTEEN KUVAUS
#3604-EU	PANAVIA™ V5 - aloituspakkaus, Universal (A2)	1 Automix-pasta ruisku (2,4 ml), 1 PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2,0 ml), 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2,0 ml), 10 sekoituskärkeä, 50 harjatikkua , sekoitusmalja
#3605-EU	PANAVIA™ V5 - aloituspakkaus, Clear	1 Automix-pasta ruisku (2,4 ml), 1 PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2,0 ml), 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2,0 ml), 10 sekoituskärkeä, 50 harjatikkua , sekoitusmalja
#3600-EU	PANAVIA™ V5 - ammattilaispakkaus	1 Automix-pasta ruisku (2,4 ml) kustakin sävystä ja 1 sovistupasta (1,8 ml) vastaavasti (värit: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque), 1 PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2,0 ml), 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2,0 ml), 1 K-ETCHANT-ruisku (3,0 ml), 30 sekoituskärkeä, 10 endokärkeä, 50 harjatikkua, sekoitusmalja, 20 neulakärkeä
#3611-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste Universal (A2)	1 Automix-ruisku (4,6 ml), 20 sekoituskärkeä
#3612-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste Clear	1 Automix-ruisku (4,6 ml), 20 sekoituskärkeä
#3613-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste Brown (A4)	1 Automix-ruisku (4,6 ml), 20 sekoituskärkeä
#3614-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste White	1 Automix-ruisku (4,6 ml), 20 sekoituskärkeä
#3615-EU	PANAVIA™ V5, Refill Paste Opaque	1 Automix-ruisku (4,6 ml), 20 sekoituskärkeä
#3621-EU	PANAVIA™ V5 sovistupasta, Universal (A2)	1 ruisku (1,8 ml)
#3622-EU	PANAVIA™ V5 sovistupasta, Clear	1 ruisku (1,8 ml)
#3623-EU	PANAVIA™ V5 sovistupasta, Brown (A4)	1 ruisku (1,8 ml)
#3624-EU	PANAVIA™ V5 sovistupasta, White	1 ruisku (1,8 ml)
#3625-EU	PANAVIA™ V5 sovistupasta, Opaque	1 ruisku (1,8 ml)
#3626-EU	PANAVIA™ V5 - sekoituskärki (20 kpl)	20 sekoituskärkeä
#3629-EU	PANAVIA™ V5 - endokärki (20 kpl)	20 endokärkeä
#3635-EU	PANAVIA™ V5 Tooth Primer à 4ml	Yksi 4 ml:n pullo
#3637-EU	CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS	Yksi 4 ml:n pullo