

**VALMISTAJAN OHJEET EN ISO 17664:2017 -STANDARDIN
MUKAISESTA LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ**
VALMISTAJA: Larident Srl

VIITE: G29/G44

VAROITUS: TUOTETTA EI TOIMITETA STERIILINÄ.
STERILOI TUOTE ENNEN KÄYTTÖÄ

AUTOKLAVOITAVA MUOVITUKI ENDODONTTISILLE SIENILLE

Käsittelyjen määrää koskeva rajoitus: tuote voidaan uudelleenkäyttää autoklavoinnin jälkeen

Käyttöalue: tuki endodonttisille instrumenteille

Säilytys ja kuljetus: tuotteella ei ole erityisvaatimuksia

Käyttömenetelmä: instrumentti on muovinen tuki endodonttisille sienille. Se on ontto ja voi sisältää desinfiointinesteitä sienen tukemiseksi juurikanavan endodonttisia instrumentteja (viilat ja tasoittimet) puhdistettaessa

Desinfiointi ja sterilointi: steriloi autoklaavikoneessa ennen käyttöä 134 °C:ssa 4 minuuttia

Kunnossapito: ei erityisvaatimuksia

Hävittäminen: hävitä tuote asianmukaisten menetelmien mukaisesti

Toiminnan tarkistus ja testaus: tarkista tuote silmämääräisesti vaurioiden tai muodonmuutosten varalta

Säilytys: tuotteella ei ole erityisvaatimuksia

Lääketieteellisten laitteiden valmistaja on vahvistanut edellä luetellut ohjeet riittäviksi laitteen valmistelemiseksi käyttöön.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että henkilöstö saavuttaa preparointiprosessissa halutut tulokset siinä käytettävillä laitteilla ja materiaaleilla.

Kaikki poikkeamat suositelluista ohjeista on tarkistettava huolellisesti tehokkuuden ja mahdollisten haitallisten seurausten suhteen.