

Kaiko-TOSI testi

PESUTEHON VALVONTATESTI

Pesutehon testi standardin EN ISO 15883 mukaisille pesu- ja desinfektiokoneille.


Toiminta

Testi-menetelmä perustuu ajatukseen, että pesu- ja desinfektiokoneen on pystyttävä pesemään veri pois instrumenteista.

Toiminnallisella TOSI-testillä tarkastat pesu- ja desinfektiolaitteesi toiminnan ja saat asetettua pesu-parametrit kohdalleen.

Toiminnallisen testin jälkeen laitteen pesutehon seurantaa jatketaan rutiinitesteillä kahden viikon välein. Rutiinitesti tehdään kuorman kanssa.

Kertakäyttöinen testiobjekti koostuu vaikeasti peseytyvästä nivelkohdasta, instrumenttia simuloivasta ruostumaton teräslevy.

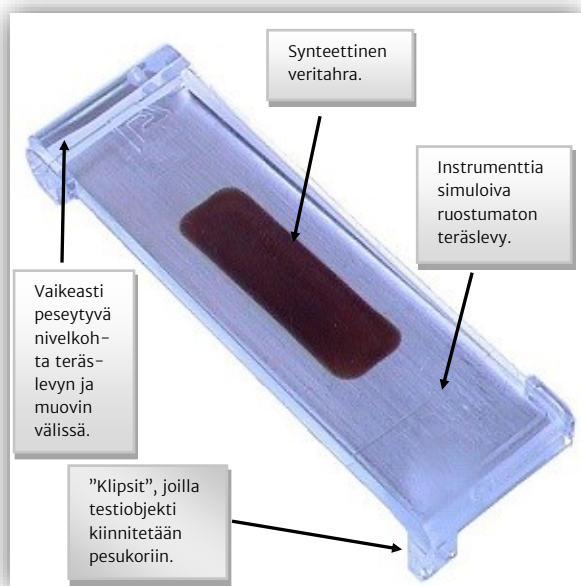

TOSI testi

Toiminta

Toiminnallisella testillä tarkastetaan pesu- ja desinfektiokoneen toimintakunto, sekä asetetaan pesu-parametrit (mm. pesuohjelman eri vaiheiden pituudet ja lämpötilat, sekä pesuaineen annostelu) kohdalleen.

Toimintakunnon testi suoritetaan aina, kun testit otetaan ensimmäisen kerran käyttöön tai kun pesu-parametreja muutetaan.

Toimintakunnon testi suoritetaan normaalilla pesu-ohjelmalla, tyhjällä koneella.


Helppokäyttöinen

Pesu- ja desinfektiokoneille

Oikea parametrien asetus

Selkeä tulkinta

Hyvä apuri validoinnissa

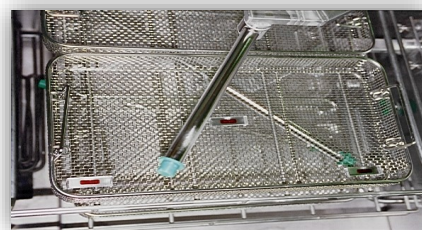

Testimenetelmät

Pesukoneen rutiinitestaus: Pesu- ja desinfektio-laitteen pesutehoa ja suorituskykyä seurataan rutiinitestein kahden viikon välein.

Rutiinitestissä TOSI-testiobjektit sijoitetaan normaalin pestävän kuorman sekaan kriittisille paikoille.

Rutiinitestillä varmistat, että pesu on tehokasta kaikissa osissa konetta kuorman kanssa. Testin avulla saat selville, mikä on kuorman sopiva koko, jotta pesutulos olisi edelleen hyvä.



Käyttöohje


Avaa TOSI-testin suojapakkauus vasta juuri ennen käyttöä.

Aseta 3 testiobjektia jokaiselle pesutasolle. Paina testiobjekti sen pohjassa olevien ”klipsien” avulla pesukorin pohjaan kiinni. Testit sijoitetaan esimerkiksi kuvan osoittamalla tavalla kriittisille paikoille: lähelle kulmia sekä korin keskelle (ei kuitenkaan sellaiseen kohtaan, jossa ei instrumenttejakaan pestä).

Aja ohjelma normaalisti läpi ja arvioi tulos koko pesuprosessin päätyttyä.

Voit kuivata testiobjektin paineilmapistoolin avulla ja halutessasi irrottaa teräslevyn päällä olevan muovipleksin.

Käytä tulosten tulkinnessa apuna TOSI-tulkintaopasta. Kirjaa tulokset ylös testikaavakkeeseen. Liitä kaavakkeeseen printti pesuprosessista (mitä kussakin pesuohjelman vaiheessa on tapahtunut).

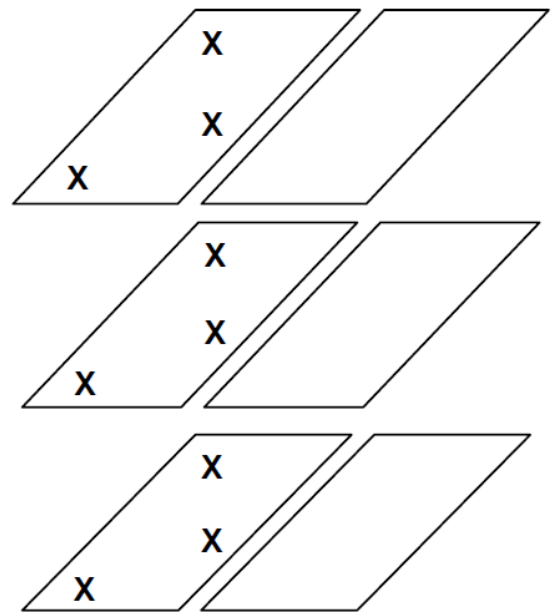

Varastointi

Säilytä TOSI-testit pakkauksessaan käyttöön asti, +2 — + 25 oC, suojaa testejä valolta, kuumuudelta ja kemikaaleilta.

Säilyvyys: 1,5 vuotta valmistuspäivästä.

Pakkaus

PEREGo3 TOSI-testipakkaus sisältää 12 kpl käyttö-valmiita testejä.

Toimitamme testien mukana värillisen tulkintakaavion.

Testi	Käyttö	Varastointi	Varastointi	Varastointi
1	1. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	2. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	3. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	4. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.
2	2. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	3. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	4. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	5. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.
3	3. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	4. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	5. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	6. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.
4	4. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	5. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	6. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	7. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.
5	5. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	6. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	7. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	8. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.
6	6. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	7. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	8. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	9. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.
7	7. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	8. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	9. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	10. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.
8	8. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	9. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	10. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	11. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.
9	9. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	10. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	11. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.	12. Testiobjektin sijoitus pesukorin pohjaan kiinni klipsien avulla.