

PIKAOPAS

VIRTA PÄÄLLE - Paina mitä tahansa painiketta | VALMIUSTILA - Paina ylä- ja alapainikkeita 1 sekunnin ajan.



KOVETUSTILAT

STANDARD POWER -TILA

KESTO	PAINIKKEEN MERKKIVALO
10 sekuntia	Yhtäjaksoinen sininen

Standard Power

XTRA POWER -TILA*

KESTO	PAINIKKEEN MERKKIVALO
3 pulssia x 1,66 sekuntia.	Sykkivä sininen

Xtra Power*

*Xtra Power -tilassa on kolmoispulssi, ja pulssien välissä on automaattisesti 0,5 sekunnin tauko. Huomioi, että Xtra Power -tilan jälkeen on 2 sekunnin mittainen jäähtymisjakso.

TILOJEN SELAUS

LIIKE



Ilmassa eteenpäin 2 kovetustilan valitsemiseksi



Ilmassa sivulla 2 diagnostisen tilan valitsemiseksi

PAINIKKEEN PAINALLUS



Selaa diagnostiikkaa tukevista tiloista kovetustiloihin painamalla yläpainiketta 1 sekunnin ajan.



Selaa kovetustiloista diagnostiikkaa tukeviin tiloihin painamalla alapainiketta 1 sekunnin ajan.

DIAGNOSTIIKKATILAT

DIAGNOSTIIKKA TUKEVA VALKOVALOTILA

KESTO	PAINIKKEEN MERKKIVALO
1 minuutti	Yhtäjaksoinen valkoinen

Diagnostiikkaa tukeva valkovalotila

DIAGNOSTIIKKA TUKEVA MUSTAVALOTILA

KESTO	PAINIKKEEN MERKKIVALO
1 minuutti	Yhtäjaksoinen

Diagnostiikkaa tukeva mustavalotila

KOVETUSLINSSIT


POINTCURE LENS

PointCure Lens -linssi tiivistää valon 2,5 mm:n aukkoon. Sopii ihanteellisesti laminaattien pistokovetukseen ja kaikille keraamikuunuille.

PROXICURE BALL LENS

Tukee matriisia ja auttaa kuperassa proksimaalisessa kosketuksessa ennen osittaista valokovetusta ja sen aikana.

Asemoi tarvikelinssi lähelle VALO X -valokovettajan linssiä niin, että magneetti kiinnittää tarvikelinssin paikalleen suojapussin päälle.

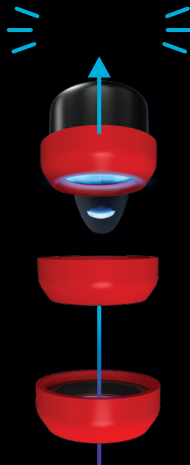

DIAGNOSTISET LINSSIT

TRANSLUME LENS

Tuottaa pidemmän aallonpituuden valon hampaiden läpivalaisua varten esim. halkeamien, murtumien ja vaurioiden visualisoimiseksi.

HAMMASVÄLI-LINSSI

Auttaa hampaiden halkeamien, murtumien tai vaurioiden visualisointia valaisemalla hampaat lingvaalisista ja havainnointiin liittyvistä varjoista.

DIFFUUSORI-LINSSI

Diagnostisessa mustavalotilassa diffuusorilinssi saa aikaan fluoresoivien hiukkasten visuaalista tukea useissa eri hammasresineissä. Diagnostisessa valkovalotilassa diffuusorilinssi tukee visuaalisesti aina, kun hammaslääketieteen ammattilainen tarvitsee luonnollista valo esimerkiksi sävyn määrittämisessä.



Katso aina käyttöohjeet ennen käyttöä.

PIKAOPAS



PARISTOJEN LATAUS JA VAIHTO

Poista valokovettajan pohjassa oleva korkki kääntämällä sitä vastapäivään. Aseta tyhjät paristot Ultradentin toimittamaan VALO-paristolaturiin, joka on varustettu lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetulla 9 VDC AC -sovittimella. Aseta paristot laturissa olevien suuntamerkintöjen mukaisesti. Paristot ladataan täyteen 1–3 tunnissa.


Paristojen käsittelyyn liittyvän sähkölaitepalon riskin välttämiseksi:

- Paristoja, paristojen kontakteja, laturia ja AC-virtalähdettä EI SAA autoklavoida eikä niihin saa suihkuttaa mitään nesteitä. Jos laturin kontakteissa on syöpyymiä, tilaa uusi laturi Ultradentin asiakaspalvelusta.
- ÄLÄ lataa paristoja syttyvien materiaalien lähellä.
- ÄLÄ pidä laturia kliinisessä ympäristössä.
- ÄLÄ lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu uudelleenladattaviksi.
- ÄLÄ lataa Ultradentin paristoja jonkin muun toimittajan laturilla.

Loukkaantumisaaran välttämiseksi ÄLÄ käytä paristoja, joissa on syöpyymiä (ruostetta) tai lommoja tai joista vuotaa hajuja tai nesteitä tai joiden koteloitinta on vaurioitunut tai puuttuu tai joissa on muita vaurioita. Tilaa uudet paristot Ultradentin asiakaspalvelusta.

JOHDOTON TAI JOHDOLLINEN KÄYTTÖ

VALO X -valokovettajaa voi käyttää johdon kanssa tai ilman johtoa Ultradent VALO X ladattavien paristojen tai mukana toimitetun VALO X -johtosovittimen kanssa.

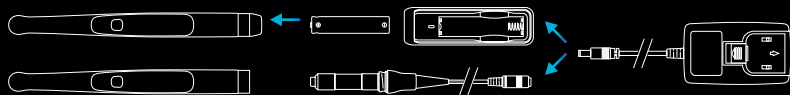

PAINIKETOIMINTO

PAINIKKEEN MERKKIVALO	TILA TAI TOIMINTO
	Standard Power -tila
	Xtra Power - kolmoispulssitila
	Diagnostiikkaa tukeva valkovalotila
	Diagnostiikkaa tukeva mustavalotila
	Valmiustila


PAINIKKEEN MERKKIVALO	TILA TAI TOIMINTO
	Alhainen virta / lataa uudelleen
	Tyhjä paristo
	Välitimeri LED-yliämpötilasuojatila

ULTRADENT.EU

© 2022 Ultradent Products, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. UPP 412-FI 1022



Skannaa edellä oleva QR-koodi tai katso lisätietoja osoitteesta www.ultradent.com/valox-eu

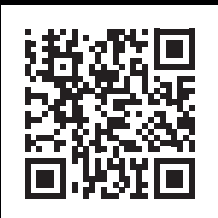

Olemme laatineet videoita ja kuvia, jotka auttavat sinua saamaan mahdollisimman suuren hyödyn VALO X-valokovettajasta. Alla mainittu verkkosivusto sisältää uuden valokovettajasi käyttöohjeita sekä puhdistusta, latausta, yleistä hoitoa ja vianetsintää sisältäviä ohjeita.

ENEMMÄNKIN VISUAALINEN OPPIJÄ?

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

HYVÄKSYTYT PUHDISTUSAINET:

- 70 % isopropyylialkoholi

Kunnossapito ja puhdistus

VALO X-valokovettaja on yksiosainen laite, jossa on kova pinta ja naarmuuntunut lasilinssi. Puhdista aina jokaisen käytön jälkeen. Katso tarkat puhdistusohjeet käyttöohjeesta.

Tarkista säännöllisesti, onko linsissä kovettunutta hammasspesiniä. Poista mahdollisesti kovettunut resini varovasti muovisella tai ruostumattomasta teräksellä valmistetulla hammasspesinillä.

VALO X-valokovettaja on suojattava suojapussilla jokaisen käytön yhteydessä, jotta vältetään riskkontaminaatio ja estetään yhdistelmämuovien tarttuminen linssin pintaan ja laiteen runkoon.

VAROITUKSET JA VAROTOIMENPITEET:

- ÄLÄ pyyhki valokovettajaa syövyttävillä tai hankaavilla puhdistusaineilla eikä autoklavoi sitä tai upota sitä ultraäänihuuteeseen, desinfiointiaineeseen, puhdistusliuokseen tai nesteeseen, jos mukana toimitettuja uudelleenkasittelyohjeita ei noudateta.
- ÄLÄ käytä sormia, instrumentteja tai muita esineitä valokovettajan paristolokeroon, sillä se voisi vaurioittaa laitetta.
- ÄLÄ yritä puhdistaa paristolokeroa sähkökontakteja tai muita osia, sillä se voisi vaurioittaa laitetta. Jos jokin asia huolestuttaa sinua, ota yhteyttä Ultradentin asiakaspalveluun.
- VALO X-valokovettaja on suojattava suojapussilla jokaisen käytön yhteydessä, jotta vältetään riskkontaminaatio ja estetään yhdistelmämuovien tarttuminen linssin pintaan ja laiteen runkoon.
- VALO X-valokovettaja on tarkoitettu käyttöön vain kliinisissä hammasspesinillä.
- ÄLÄ käytä VALO X-tarvikkeita tai sterilointiä kuivalla lämmöllä, jotta vältetään tuotteen vaurioitumisen riski.
- ÄLÄ käytä VALO X-tarvikkeita lopulliseen kovetukseen. Poista kaikki tarvikkeet kovetussilinsin käytön jälkeen ja suorita lopullinen kovetus ilman tarvikkeita.