



Desinfektioaine

Kiilto Pro Erisan Oxy+

Vetyperoksidiin ja peretikkahappoon perustuva Kiilto Pro Erisan Oxy+ on tarkoitettu ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden ja välineiden puhdistukseen ja desinfektioon, terveydenhuollon tekstiilien desinfektioon sekä veri- ja eritetahradesinfektioon.

KÄYTTÖLAIMENNOKSEN VALMISTUS

Valmista käyttöliuos ohjeen mukaan. Valmistaessasi 5 l käyttölaimennosta (2 %) kanisteriin, mittaa ensin n. 2,5 l kädenlämpöistä vettä ja kaada kahden pussin (1 pussi = 50 g) sisältö tähän vesimäärään.

Anna desinfektioaineen liueta veteen ja lisää tämän jälkeen loput vedet. Näin tuotteen aktivoitumisen seurauksena muodostuva vaahto ei nouse kanisterin suuaukolle. Sulje kanisterin korkki löyhästi.

	%	Erisan Oxy+	vesi	Huom!	Puhtaan käyttölaimennoksen säilyvyys
Pintojen desinfektio / lääkinnälliset laitteet	2 %	50 g	2,5 l		1 viikko
	5 %	50 g	1 l		2 vrk
Instrumenttien desinfektio (upotus) - manuaalinen käsittely tai ultraäänilaitte	2 %	50 g	2,5 l	vaikutusaika 30 min	Vaihdettava uuteen päivittäin, tarvittaessa useamman kerran päivässä
	5 %	50 g	1 l	vaikutusaika 15 min	
High level -desinfektio	5 %	50 g	1 l	vaikutusaika 30 min	2 vrk
Hammashuollon tehoinmut	2 %	50 g	1 l		1 viikko
Terveydenhuollon tekstiilit (5-7 kg pyykkiä)	0,5 %	50 g		Käytä pyykin- pesuainetta 1/2 annosta normaalista	



Kiilto Pro Erisan Oxy+

INSTRUMENTTIEN MANUAALINEN DESINFEKTIO

Työturvallisuuden sekä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi muista instrumenttien esidesinfektio ennen varsinaista desinfektiota ja manuaalista puhdistusta.

Muista suojautuminen: pue yllesi kosteutta läpäisemätön esiliina, suojakäsineet sekä silmiensuojain. Käytä kannellista, puhdasta välineliotusastiaa.




1. Pue tarvittavat suoja-
varusteet.


Pidä suojaruusteita koko puhdistuksen ja desinfioinnin ajan, vaihda uusiin tarvittaessa.




2. Valmista 2 % Erisan Oxy+
-liuos; suhdelukuna 2,5 l
kädenlämpöistä vettä ja 1 pussi
(50 g) Erisan Oxy+ -granuloitua
jauhetta.

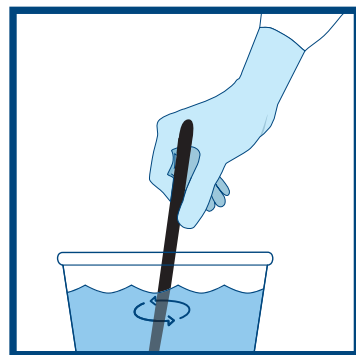

3. Sekoita jauhetta nopeuttaak-
sesi sen liukenemista veteen.
Liuos on käyttövalmista sitten,
kun jauhe on täysin liennut
veteen.

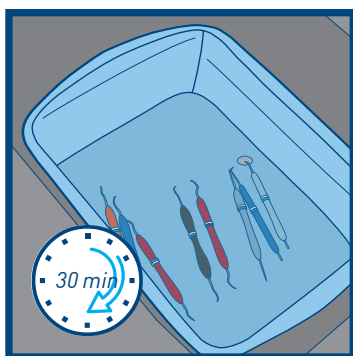

4. Liota instrumentteja
liuoksessa 30 min ajan.

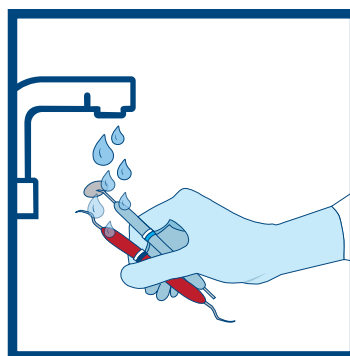

5. Huuhtelee desinfioitua instru-
mentit huolella ja kuivaa.