



Kiilto Pro Steel

Hapan erikoispesuaine



Hapan erikoispesuaine kalkki- ja ruostesaostumien sekä oksidikalvojen poistoon terveydenhuollon instrumenttipesukoneista ja instrumenteista.

Käyttökohteet

Välinehuollon erikoistuote: Soveltuu manuaalisiin ja koneellisiin menetelmiin, myös käytettäväksi ultraäänipesulaitteissa. Ruostumaton teräs, muovit, silikonimateriaali, useimmat alumiini-, messinki- ja kuparimateriaalit.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Steel on erikoistuote instrumenttipesukoneiden ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen instrumenttien pinnan kalkki- ja ruostesaostumien sekä oksidikalvojen poistoon. Poistaa tahroja myös silikonin ja muovipinnoilta. Steel poistaa saostumat ja kirkastaa metallipinnat. Tuote huuhtoutuu pinnoilta hyvin.

Käyttö- ja annostusohje

Instrumenttikoneen puhdistus: 100-300 ml (0,5 - 1,5 % laimennos), kalkinpoisto-ohjelma. Jos käytetään muita pesuohjelmia, on varmistettava, ettei muita pesuaineita käytetä samanaikaisesti. Instrumenttien puhdistus: 20 % käyttöläimennos (2 dl/0,8 l vettä) lämpimään veteen, 30 min - 1 h liotusaika. Jos saostumaa jää instrumentteihin, pyyhi pinta. Pese ja huuhtele instrumentit heti liotuksen jälkeen. Ultraäänipesulaitteessa: 20 ml - 200 ml/l - 0,8 l lämmintä vettä. Instrumenttien liotus 30 min, jonka jälkeen ohjelman kesto 10 min, huolellinen huuhtelu.

Huomioitavaa

Käytetty liuos vaihdetaan päivittäin. Hapan tuote. Ei saa sekoittaa klooripitoisten aineiden kanssa. Korroosioaurioiden välttämiseksi tuote ei saa kuivua pinnoille.

Koostumus

Tehoaine	Vaikutus	
Orgaanisia happoja	15-30 %	liuottaa saostumat
Glykolieetteriä	5-15 %	liuotin, lisää puhdistustehoa
Ionittomia tensidejä	< 5 %	pinnan kostuttaja, pesuaktiiviaine

Tuotteen pH

1.5 vahvasti hapan

Käyttöliuoksen pH

3.0 hapan

Varastointi

Säilytettävä huoneenlämmössä, käyttö 3 v. valmistusajankohdasta.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste, ominainen tuoksu

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Steel happamaan erikoispuhdistusaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
		8223	6417964082234	6417964486476
6 x 1 l		8224	6417964082241	6417964482935



Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.