

BIO-C TEMP

SUOMI

MÄÄRITELMÄ

Käyttövalmis biokeraaminen juurikanavalääke.

KÄYTTÖTARKOITUS

Juurikanavalääke aikuis- tai lapsipotilaiden pysyvien hampaiden juurihoitoon.

INDIKAATIOT

1. Juurikanavalääke juurihoitoon hampaissa, joissa on pulpanekroosi, sekä uusintajuurihoitoon;
2. Juurihoitoon hampaissa, joissa on perforaatioita, ulkoista ja sisäistä resorptiota, ennen BIO-C-REPAIR, MTA REPAIR HP JA MTA ANGELUS -tuotteiden käyttöä;
3. Apeksifikaatiohoitoon avoimen juurenkärjen sulkemiseksi.

KOOSTUMUS

Kalsiumsilikaatit, kalsiumaluminaatti, kalsiumoksidi, kalsiumvolframaatti ja titaanidioksidi sekä dispersioaine.

TEKNISET TIEDOT

- Bioyhteensopiva tuote on valmis käytettäväksi sellaisenaan;
- Korkea emäksisyys — pH: 12±1;
- Korkea radio-opasiteetti: ≥ 9 mm alumiinilevyasteikolla ISO 6876 -standardin mukaan.

KÄYTTÖTEKNIikka

A. ANNOSTELUKÄRJEN KÄYTTÖ

1. Aseta applikaattorikärki ruiskuun;
2. Suosittelemme käyttämään kertakäyttöistä muovista suojaa ruiskun päällä kontaminaation välttämiseksi;
3. Varmista materiaalin tulo ruiskusta ennen lääkkeen asettamista kanavaan;
4. Aseta ruiskun kärki kanavaan ja paina mäntää kevyesti estääksesi tuotteen liiallisen ulostulon;
5. Sulje ruisku vetämällä mäntää taaksepäin lopettaaksesi ulosvirtauksen;
6. Puhdista ylimääräinen materiaali ruiskun kärjestä ja sulje se kevyellä paineella käytön jälkeen estääksesi materiaalia kovettavan kosteuden pääsyn ruiskuun;
7. Puhdista ja desinfioi ruisku ennen seuraavaa käyttöä kontaminaation välttämiseksi.

B. KÄYTTÖ JUURIKANAVALÄÄKKEENÄ

1. Puuduta, aseta kofferdam ja tee juurikanavan kemomekaaninen preparointi. Sisäisen resorption kohdalla poista tulehtunut resorptiokudos siihen sopivilla instrumenteilla;
2. Kuivaa kanava paperinastoilla;
3. Purista kovettunut materiaali ruiskun kärjestä;
4. Aseta annostelukärki ruiskuun;
5. Vie ruiskun kärki juurikanavan apikaalikolmannekseen;

6. Levitä BIO-C® TEMPIä painamalla mäntää kevyesti ja samalla vetämällä ruiskua vähitellen taaksepäin, kunnes juurikanava on täyttynyt kokonaan;
7. Poista ylimääräinen lääkeaine pulpakavumin alueelta;
 - Huomautus: Kontrolloi hampaan oireettomuus ennen juurentäyttöä.
8. Ennen juurentäyttöä poista juurikanavalääke kanavasta käyttämällä natriumhypokloriittia ja harjaamalla juurikanavan seinämiä Kerr-tyyppisellä juurihoitoviilalla;
9. Huuhtelee juurikanava 17-prosenttisella EDTA-liuoksella. Tarvittaessa aktivoi EDTA ultraäänikärjellä 3 kertaa 10 sekunnin ajan;
10. Täytä kanava tiivistysaineella, kuten BIO-C® SEALER tai MTA-FILLAPEX, ja guttaperkkanastalla;
11. Sulje koronaalinen avaus.

VAROTOIMET

- Tuote on herkkä kosteudelle, joten sulje pakkaus tiiviisti kuivumisen estämiseksi;
- Älä säilytä tuotetta jääkaapissa;
- Älä käytä annostelukärkiä uudelleen;
- Puhdista ja desinfioi ruisku ennen seuraavaa käyttöä kontaminaation välttämiseksi.
- Käytä suojalaseja, kasvovisiiriä ja hanskoja käsitellessäsi tuotetta. Jos tuote joutuu kosketuksiin silmien tai ihon kanssa, huuhtelee vedellä.
- Älä käytä tuotetta sen viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Älä käytä tuotetta, jos sen pakkaus on vaurioitunut.
- Älä käytä sitä potilailla, joilla on yliherkkyys tuotteen ainesosille.
- Tuotetta ei ole testattu raskaana olevilla eikä imettävillä naisilla.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tuote on tarkoitettu väliaikaiseksi juurikanavalääkkeeksi (ei yli 30 päivää).
 - *Tuote on tarkoitettu ainoastaan hammaslääkärin käyttöön.*

Kaikki tähän tuotteeseen liittyvät vakavat tapahtumat on ilmoitettava valmistajalle ja kyseisen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu.

SÄILYTYS

- Säilytä tuotetta kuivassa ja ilmastoidussa paikassa 15–30°C:n lämpötilassa alle 60 % ilmankosteudessa.
- Älä säilytä tuotetta jääkaapissa.
- Käytön jälkeen SULJE RUISKU TIIVIISTI käyttäen alkuperäistä korkkia.
- Säilytä ruisku pakkauksessa, jossa on piidioksidigeeliä, ja SULJE PAKKAUS TIIVIISTI.
- Käytettäessä biokeraamista materiaalia, kuten BIO-C TEMPIä, poista annostelukärki käytön jälkeen ja sulje ruisku alkuperäisellä korkilla.