

Fl. Multi-Cal

Ei-kovettuva • pH > 12 • Röntgenopaakki.

TUOTEKUVAUS

Multi-Cal on pehmeä, kermamainen, ei kovettuva kalsiumhydroksidivalmiste vesipohjaisessa hydroksietyyliselluloosapohjassa, jossa on mukana bariumsulfaattia. Sitä suositellaan kliinisiin kalsiumhydroksidipastan indikaatioihin. Se on pasta, ei kova basemateriaali.

INDIKAATIOT

Suora pulpankattaminen, osittainen pulpotomia, pulpotomia, dentiinsillan muodostaminen, vaihteittainen tai osittainen juurihoito, periapikaaliset kystat, abskessit ja leesiot, juuriresorptiot, juuriperforaatiot, apexifikaatio.

KONTRAINDIKAATIOT

Ei kova basemateriaali.

VITAALIN PULPAN HOITO

Multi-Cal viedään suoraan pulpan päälle kaikissa pulpankattamisissa, pulpotomiassa ja osittaisessa pulpotomiassa. Se stimuloi pulpaa muodostamaan uutta dentiinisiltaa, mikä on nähtävissä 2-3 kuukauden kuluttua.

OHJEET SUORAAN PULPANKATTAMISEEN

1. Aseta 22-gaugen vientikärki Multi-Cal ruiskuun ja vie ohut kerros

Multi-Cal paljastuneelle dentiinille ja kuivaa kevyesti ilmalla.

2. Vie pisara Multi-Cal 3 mm kerroksena suoraan paljastuneen pulpan päälle ja kuivaa kevyesti ilmalla kunnes näkyy "kuori". Multi-Cal ei kovetu kovaksi

3. Taputtele pasta vanupallolla varmistaaksesi pulpakontakti.

4. Vie ohut sekoitus kovaksi kovettuvaa sementtiä Multi-Cal päälle.

5. Kun sementti on kovettunut, tee lopullinen täyte.

Huom: Ei vitaalipulpotomiassa ja osittaisessa pulpotomiassa taputtele pulpaa hellävaraisesti steriilillä vanupallolla kunnes verenvuoto hyytyy, ja etene sitten kuten yllä. Voidaan käyttää paikallispuudutetta.

JUURIKANAVAHOITO

Käytä rutiinisti juurikanavien täytteenä käyntien välillä ja kystiin, abskesseihin, leesioihin jne. Myös apeksifikaatioihin ja muihin kovakudoksen muodostuksiin.

JUURIKANAVAHOITO

1. Preparoi ja puhdisti juurikanava perinteiseen tapaan.

2. Aseta 22-gaugen vientikärki Multi-Cal ruiskuun ja täytä kanava Multi-Cal.

3. Suojaa kanavan suut haluamallasi sementillä

4. Multi-Cal on helppo poistaa viilalla ja huuhtelemalla.

5. Tarvittaessa pidempää juurikanavahoitoa, vaihda täyte joka kuukausi

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

- Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa viileässä huoneenlämmössä. Vältä suoraa valoa, korkeaa lämpötilaa, kontaminaatiota ja syttymislähdettä.
- Avaamattoman tuotteen säilyvyysaika: 2 vuotta valmistuspäivästä.
- Sulje välittömästi käytön jälkeen.

Huomaa: Vaihda uusi vientikärki jokaisella potilaalle. Pidentääksesi Multi-Cal säilyvyysaikaa, laita tippa vettä korkkiin ja vie korkki paikoilleen välittömästi käytön jälkeen.

VAROITUS

Voi ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitystä, ruuansulatuskananavaa tai limakalvoja, erityisesti isoina määrinä ja/tai pitkäkestoisessa altistuksessa. Vain hammashoidon ammattilaisten käyttöön. Käytä suojakäsineitä, suojalaseja, pese kädet käytön jälkeen. Vältä tarpeetonta altistumista.

VAKAVIEN TAPAUSTEN/VAARATILANTEIDEN RAPORTOINTI

Kaikki tuotetta koskevat vaaratilanteet tulee raportoida valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianmukaisille viranomaisille missä tapaus on sattunut tai muulle vastuulliselle valvontaelimelle. Raportti vakavista vaaratilanteista tulee lähettää

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

Huomio: Käytä kertakäyttöinen ruiskunsuoja/ kääre monikäyttöisten hammashoidon annostelijoiden päälle ennen jokaista potilakäyttöä. Lisätiedot:

<https://www.fda.gov/medicaldevices/dental-devices/multiple-use-dentaldispenser-devices>

Huomiotavaa: Katso tämän tuotteen materiaalitiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.