

FI. PEG

TUOTEKUVAUS

9.6% fluorivetyhappogeeli.

INDIKAATIOT & KONTRAINDIKAATIOT

Posiinpintojen ja hybridimuovien pintojen etsaukseen ennen sementointia tai sidostusta resiineillä tai resiinisementteillä. Älä vie kontaktiin hampaiden tai pehmytkudoksen kanssa.

KÄYTTÖOHJEET

1. Käyttäjän, hoitajan ja potilaan tulee käyttää suojalaseja. Käyttäjän ja hoitajan tulee käyttää suojakäsineitä.
2. Aseta kofferdam eristämään työskentelyalue ja suojamaan pehmytkudokset.
3. Hoitajan tulee olla valmiina hoitotuolin vieressä ja pitää tehoimua 5-7 cm etäisyydellä posliinipinnasta etsauksen aikana happohöyryjen poistamiseksi.
4. Kiinnitä 25- gaugen luer lock vientikärki tiukasti ruiskuun. Aloita varovasti Porcelain Etch gelin ruiskuttaminen lehtiölle ja hävitä tämä annos välittömästi. Älä aloita ruiskuttamista potilaan suussa. Saadaksesi parhaan kontrollin ruiskutuksen aikana, älä työnnä mäntää peukalolla. On suositeltavaa pitää ruiskun säiliötä peukalon ja etusormen välissä, mäntä kämmentä vasten. Vedä varovaisesti peukalolla ja etusormella ja aloita ruiskutus. Käytä uutta annostelukärkeä jokaiselle potilaalle.
5. Käytä hellävaraista voimaa ja annostele huolellisesti Porcelain Etch geliä posliinipinnalle ja anna vaikuttaa 1 minuutti samalla poistamalla happohöyryjä tehoimulla. Jotkut keraamiset materiaalit eivät etsaannu. Saadaksesi näihin materiaaleihin sidostukseen sopiva pinta suositellaan Ilma-abraasiota. Mekaanisen retention aikaansaaminen on hyödyllistä. Vie ruiskuun korkki päälle välittömästi käytön jälkeen.
6. Poista geeli tehoimulla ja huuhtelee käsitelty pinta runsaalla vedellä. Kuivaa posliinipinta puhtaalla, ei-kontaminoituneella ilmalla.
7. Jos käytät Embrace First-Coatia, noudata First-Coatin™ tai Embrace™™ WetBond™ Restoration and PFM Repair Kit -korjaussarjan käyttöohjeita. Mikäli käytetään Silane Bond Enchanceria seuraa silaanin käyttöohjeita.
8. Jatka sementoimalla tai sidostamalla resiineillä tai resiinisementteillä.

HUOMIO:

Porcelain Etch Gel sisältää 9.6% fluorivetyhappoa, joka on tehokas ja aggressiivinen kemikaali, joka muodostaa ärsyttäviä höyryjä ja sitä tulee käsitellä erityisen huolellisesti. Nieleminen, iho-tai silmäkontakti ja krooninen höyryjen hengitys on vaarallista. Käyttäjän, hoitajan ja potilaan suojauksesta tulee huolehtia. Top Dent Porcelain Etch Gel on puskuroitu, geelimäinen ja pakattu niin että fluorivetyhapon vaarat on minimoitu, edellyttäen että sitä käytetään näiden ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS:

Mikäli Porcelain Etch Gel joutuu kontaktiin ihon tai pehmytkudoksen kanssa, huuhtelu altistunut alue runsaalla vedellä. Käytä tehoimua veden poistamiseen.

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa viileässä huoneenlämmössä. Vältä suoraa valoa, korkeaa lämpötilaa, kontaminaatiota ja syttymislähdettä. Avaamattoman tuotteen säilyvyysaika: 2 vuotta valmistuspäivästä. Sulje välittömästi käytön jälkeen.

Huomio: Vie kertakäyttöinen ruiskunsuoja/ kääre monikäyttöisten hammashoidon annostelijoiden päälle ennen jokaista potilaskäyttöä. Lisätiedot: <https://www.fda.gov/medicaldevices/dental-devices/multiple-use-dentaldispenser-devices>

VAKAVIEN TAPAUSTEN/VAARATILANTEIDEN RAPORTOINTI

Kaikki tuotetta koskevat vaaratilanteet tulee raportoida valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianmukaisille viranomaisille missä tapaus on sattunut tai muulle vastuulliselle valvontaelimelle. Raportti vakavista vaaratilanteista tulee lähettää

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

Huomiotavaa: Katso tämän tuotteen materiaalitiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.