

FI. Kool-Dam

TUOTEKUVAUS

Valokovetteinen, ei lämpenevä nestemäinen kofferdami ja Block Out Resiini.

INDIKAATIOT

Tehovalkaisu: Suojaa pehmytkudokset tehovalkaisun aikana

Block-out resiini: Täyttää allemenot ja pehmytkudosonkalot ennen jäljennöksen ottamista.

Hiekkapuhallus: Suojaa pehmytkudosta ja peittää hampaita hiekkapuhalluksen aikana.

KONTRAINDIKAATIOT

Ei korvaa kofferdamkumia endodottisissa töissä.

KÄYTTÖOHJEET

1. Aseta vihreä 18 -gaugen tai pinkki 20 -gaugen vientikärki tiiviisti luer lock ruiskuun.
2. Vie 1-2mm kerros Kool-Dam suojaksi ienkudokselle tai hampaan pinnoille ennen tehovalkaisua, hiekkapuhallusta tai muita toimenpiteitä, jotka vaativat intraoraalisen suojauksen tai vie se täytettäville alueille ennen jäljennöksen ottoa. Kool-Dam ei valu ja se voidaan viedä useammalle hampaalle ennen kovettamista. Vie suojakorkki välittömästi käytön jälkeen.
3. Valokoveta 10 sekuntia, riippuen käytettävästä valosta.

HUOMIO

Kovettamaton materiaali voi aiheuttaa silmätai ihoärsytystä kontaktissa. Hammashoidon ammattilaisten tulee käyttää suojalaseja ja kirurgisia käsineitä. Älä ylitä käyttämäsi valon valmistajan suosittelemaa kovetusaikaa.

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

- Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa viileässä huoneenlämmössä. Vältä suoraa valoa, korkeaa lämpötilaa, kontaminaatiota ja syttymislähdettä.
- Avaamattoman tuotteen säilyvyysaika: 2 vuotta valmistuspäivästä.
- Sulje välittömästi käytön jälkeen.

Huomio: Vie kertakäyttöinen ruiskunsuoja/ kääre monikäyttöisten hammashoidon annostelijoiden päälle ennen jokaista potilaskäyttöä. Lisätiedot: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenserdevices>

VAKAVIEN TAPAUSTEN/VAARATILANTEIDEN RAPORTOINTI

Kaikki tuotetta koskevat vaaratilanteet tulee raportoida valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianmukaisille viranomaisille missä tapaus on sattunut tai muulle vastuulliselle valvontaelimelle. Raportti vakavista vaaratilanteista tulee lähettää

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
email: pulpdent@pulpdent.com

Huomiotavaa: Katso tämän tuotteen materiaalitiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.