

PULPDENT®

LIME-LITE™ ENHANCED

Bioactive Light Cure Cavity Liner

Kalsiumia, fosfaattia ja fluoridia vapauttava - Röntgenopaakki - Kosteutta sietävä - Yleinen dentiinisävy - Ei sisällä BPA:ta

TUOTEKUVAUS

Lime-Lite Enhanced on mineraaleilla rikastettu uretaani dimetakrylaatti lineri ja alustäyteaine, joka on kosteussystävällinen, valonkovetteinen ja röntgenopaakki. Se vapauttaa kalsiumia, fosfaattia ja fluoria.

KÄYTTÖAIHEET

Tarkoitettu valokovetteiseksi lineriksi ja alustäyteaineeksi.

VASTA-AIHEET

Ei sovellu käytettäväksi suoraan altistuneeseen pulpaan.

KÄYTTÖOHJEET

1. Valmistele ontelo, huuhtelee ja kuivaa, mutta älä kuivata hammasta.
2. Aseta vaaleanpunainen 20G annostelukärki tukevasti Lime-Lite Enhanced -ruiskuun.
3. Levitä 1-1½ mm Lime-Lite Enhancedia dentiiniin.
4. Valokovetetaan 20 sekunnin ajan (450 mW/cm^2). Älä ylitä valmistajan suosittelemaa kovetusaikaa käyttämällesi valolle.
5. Jos sitä käytetään pohjana, levitä 1-1½ mm:n lisäyskerroksia ja koveta jokainen kerros valolla. Sulje ruisku välittömästi käytön jälkeen.
6. Jatka korjausta. Lime-Lite Enhanced voidaan etsata, ja se on yhteensopiva kaikkien sidosaineiden ja hammasproteesimateriaalien kanssa. Sitä voidaan käyttää sekä avoimessa että suljetussa sandwich-tekniikassa.

HUOMAA:

- Jos Lime-Lite Enhancedia käytetään vesipohjaisten sementtien, kuten sinkkifosfaatti-, polyakryyli- tai lasi-ionomeerisementin alla, poista kovettumaton hartsi Lime-Lite Enhancedin pinnalta (hapan estokerros) alkoholiin kostutetulla puuvillapyyhkeellä.

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

- Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa viileässä huoneenlämmössä. Vältä suoraa valoa, korkeaa lämpötilaa, kontaminaatiota ja syttymislähdettä.
- Avaamattoman tuotteen säilyvyysaika: 2 vuotta valmistuspäivästä.
- Sulje välittömästi käytön jälkeen.

VAROITUS

Kovettumaton materiaali voi aiheuttaa silmien tai ihon ärsytystä joutuessaan kosketuksiin.

Hammaslääkäreiden on käytettävä suojalaseja ja kirurgisia käsineitä. Älä ylitä valmistajan suosittelemaa kovetusaikaa käyttämällesi valolle.

VAKAVIEN TAPAUSTEN/VAARATILANTEIDEN RAPORTOINTI

Kaikki tuotetta koskevat vaaratilanteet tulee raportoida valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianmukaisille viranomaisille missä tapaus on sattunut tai muulle vastuulliselle valvontaelimelle. Raportti vakavista vaaratilanteista tulee lähettää

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

Huomio: Vie kertakäyttöinen ruiskunsuoja/ kääre monikäyttöisten hammashoidon annostelijoiden päälle ennen jokaista potilaskäyttöä. Lisätiedot: <https://www.fda.gov/medicaldevices/dental-devices/multiple-use-dentaldispenser-devices>

Huomio: Katso tämän tuotteen materiaalitiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.