

PULPDENT®

SNOOP™ Caries Detecting Dye

Propyleeniglykolipohjainen kariksenilmaisain.

TUOTEKUVAUS

Tummansininen kariksen havaitsemisväri propyleeniglykolin nestemäisessä formulaatiossa

KÄYTTÖAIHEET

Karioituneen dentiinin sijoittamiseen, jotta voidaan erottaa ulompi infektoitunut dentini sisäpuolisesta infektoituneesta dentiinistä

VASTA-AIHEET

Älä aseta dentiinille yli 10 sekunniksi

KÄYTTÖOHJEET

1. Kofferdamkumin käyttö on suositeltavaa.
2. Käytä Snoopia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ontelon valmistelua, jotta vältät liian suuren hammasrakenteen poistamisen.
3. Huuhtelee hoitoalue vedellä ja kuivaa.
4. Aseta applikaattorin pillit tiukasti tiputtimen suuttimeen. Annostele SNOOP varovasti ja kevyesti painamalla suoraan onteloon 10 sekunnin ajaksi. Vaihtoehtoisesti voit pitää pulloa pystysuorassa ja annostella pisaran SNOOPia sekoituskuppiin. Levitä SNOOPia varovasti onteloon pienellä sienellä, siveltimellä tai paperikärjellä 10 sekunniksi.
5. Käytä 10 sekunnin kuluttua välittömästi imua ja huuhtelee ontelo vedellä ja kuivaa se sitten.
6. Poista värjäytynyt dentini kovertimella tai matalanopeuksisella käsikappaleella, jossa on pyöreä poranterä.
7. Toista menettely, kunnes värjäytymistä ei tapahdu.

VAROITUS

• Snoop sisältää väriainetta, joka tahraa. Käsittele varoen. • Levitä Snoopia vain värjättävään hampaaseen eikä viereisiin hampaisiin. • Jos Snoop joutuu kosketuksiin vaatteiden, mattojen tai huonekalujen kanssa, pese välittömästi saippualla ja vedellä. • Jos Snoop joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtelee runsaalla määrällä vettä 15 minuutin ajan ja käänny lääkärin puoleen. • Käytä silmäsuojaimia. Käytä Kofferdamkumia. Suojaa potilas muovisella suojaliinalla • Säilytä lasten ulottumattomissa.

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

- Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa viileässä huoneenlämmössä. Vältä suoraa valoa, korkeaa lämpötilaa, kontaminaatiota ja syttymislähdettä.
- Avaamattoman tuotteen säilyvyysaika: 2 vuotta valmistuspäivästä.
- Sulje välittömästi käytön jälkeen.

Huomio: Vie kertakäyttöinen ruiskunsuoja/ kääre monikäyttöisten hammashoidon annostelijoiden päälle ennen jokaista potilaskäyttöä. Lisätiedot: <https://www.fda.gov/medicaldevices/dental-devices/multiple-use-dentaldispenser-devices>

VAKAVIEN TAPAUSTEN/VAARATILANTEIDEN RAPORTOINTI

Kaikki tuotetta koskevat vaaratilanteet tulee raportoida valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianmukaisille viranomaisille missä tapaus on sattunut tai muulle vastuulliselle valvontaelimelle. Raportti vakavista vaaratilanteista tulee lähettää

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

Huomio: Katso tämän tuotteen materiaalitiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.