

DESINFIOINTIAINE HAMMASLÄÄKETIETEELLISTEN YKSIKÖIDEN VESIKANAVILLE.

LÄÄKETIETEELLINEN LAITE VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.



Luokan IIa lääkinnällinen laite direktiivin 93/42/ETY ja myöhempien lisäysten ja muutosten mukainen

Sopii kaikille hammaslääketieteellisille yksiköille ja on hyväksytty Anthos, Stern Weber ja Castellini yksiköille.

Käyttöohjeet.

Desinfiointi: noudata yksikön ohjeita ja lisää puhdas tuote (vetyperoksidi, 3 %) yksikön olevaan desinfiointiaineelle varattuun kohtaan. Itsenäisen vedensyötön bakteriostaattinen suojaus: laimenna 20 ml tuotetta kutakin (tislattua) vesilitraa kohden syöttösäiliöön, jolloin tuloksena on 600 ppm:n vetyperoksidi-liuos.

Vaikutus yksikön vesikanavissa: 3 %:n vetyperoksidi on osoittautunut tehokkaaksi mykobakterisidiseksi, bakterisidiseksi ja fungisidiseksi 10 minuutin kontaktiaikana.

600 ppm:n liuos on osoitetusti tehokas estämään mikrobien kasvua kanavissa.

Varoitukset.

Käytä hammashoitolaitteen käyttöohjeiden mukaan.

Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Jos pakkaus ei ole ehjä, älä käytä tuotetta.

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa 5–40 °C:n lämpötilassa suojattuna valolta, kosteudelta ja lämmöltä.

Käyttäjät Euroopassa: ilmoita CEFLA s.c:lle ja käyttäjän ja/tai potilaan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista vakavista laitteeseen liittyvistä onnettomuuksista.

Koostumus.

Vetyperoksidi 3 %, hopeaionit 0,001 %, kuten Ag+, stabilointiaineet, vettä tarpeen mukaan.



PERICOLO:

P262 Vältä kosketusta silmiin, ihoon ja vaatteisiin.

P305+P351+P338 JOS TUOTETTA JOUTUU SILMIIN, huuhtelee hyvin usean minuutin ajan.

Poista tarvittaessa piilolinssit. Jatka huuhtelua.



CEFLA s.c.

Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola (BO) Italy

Tel. +39/0542 653111 Fax +39 0542 653344

Plant: Via Bicocca, 14/c - 40026 Imola (BO) Italy

Tel. +39 0542 653441 Fax. +39 0542 653555



MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28

6302 Zug - Switzerland