

Retrax® Gel AS / Retrax® Gel AS Clear

Jokainen 0,75 g esitötetty ruisku sisältää 25 % alumiinisulfaattigeeliä

Käyttöaiheet:

Retrax® Gel AS / Retrax® Gel AS Clear on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien ienretraaktiolankojen kanssa auttamaan ienvetäytymisessä ja hemostaasissa. Retrax® Gel AS / Retrax® Gel AS Clear helpottaa langan alkuperäistä asettamista tarjoamalla voitelua langan pakkaamisen aikana, jolloin lanka liukuu helpommin ienuurteeseen.

Retrax® Gel AS / Retrax® Gel AS Clear -geeliä voidaan käyttää myös minkä tahansa restauraation aikana, jossa tarvitaan ienvetäytymistä ja hemostaasia. Tämä tuote on tarkoitettu paikalliseen toimistokäyttöön. Jokainen patruuna on kertakäyttöinen. Retrax® Gel AS / Retrax® Gel AS Clear on yhteensopiva kaikkien Pascalin lääkkeellisten ja lääkkeettömien retraktiolankojen kanssa.

Vasta-aiheet:

Ei tunnettuja.

Varoitukset:

Vain paikalliseen intraoraaliseen käyttöön. Ei saa niellä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Varotoimet:

- Vain ammatilliseen hammashoitokäyttöön.
- Älä käytä potilaille, joilla on allergia alumiinisulfaatile.
- Retrax® Gel AS sisältää keinotekoista väri- ja aromiainetta; varmista, ettei potilaalla ole tunnettuja allergioita.
- Retrax® Gel AS Clear ei sisällä keinotekoista väriainetta, mutta sisältää keinotekoista aromia.
- Voimakasta imua suositellaan mahdollisen nielämisen estämiseksi.
- Retraktiolangan uudelleenkäyttö lisää kudosaaurion tai infektion riskiä.

Annostus:

Käytä tarpeen mukaan hemostaasin saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Normaalissa käytössä yksi kertakäyttöinen ruisku riittää enintään kahteen applikaatiokohtaan.

Käyttöohjeet:

- 0,75 g esitötettyä ruiskua tulee käyttää yhdessä kertakäyttöisen applikaatiokärjen tai MicroFusor™-kärjen kanssa.
- Poista ruiskun korkki ja kiinnitä kärki.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi vedä ruiskun mäntää hieman taakse ennen ensimmäistä käyttöä.
- Levitä geeli varovasti suoraan ienuurteeseen.
- Valitse sopiva lanka ja pakkaa se geeliin. Odota 2–6 minuuttia.
- Jos verenvuoto jatkuu, huuhtelee alue ja levitä geeli uudelleen. Odota 2–6 minuuttia.
- Poista lanka.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi huuhtelee ja kuivaa käsittelyalue huolellisesti.
- Jatka toimenpidettä normaalisti.
- Hävitä ruisku ja käyttämätön Retrax® Gel AS.

Ruiskut on tarkoitettu vain kertakäyttöön, eikä niitä saa käyttää uudelleen tai steriloida autoklaavissa.

Käyttöturvallisuustiedote (SDS) on saatavilla yrityksen verkkosivuilta osoitteessa pascaldental.com tai ottamalla yhteyttä Pascal.

Pascal's Retrax® Gel AS ja Retrax® Gel AS Clear ovat vapaita gluteenista, soijasta, maidosta, kananmunasta, maapähkinästä ja pähkinöistä.

Pascal International, Inc.
2929 Northup Way
Bellevue, WA USA 98004
425.827.4694 • 800-426-8051
www.pascaldental.com

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
EC REP