

## Retrax® Gel FS

Jokainen 0,75 g kertakäyttöinen ruisku sisältää 15,5 % ferrisulfaattigeeliä.

### **Käyttöaiheet:**

Käytetään ientaskun retraktion helpottamiseksi ja hammasjäljennöstoimenpiteisiin liittyvän liiallisen kapillaarivuodon hillitsemiseksi sekä kudosten hallintaan muissa hammashoidon vaiheissa. Tämä tuote on tarkoitettu vain paikalliseen käyttöön, ja jokainen ruisku on tarkoitettu kertakäyttöön. Retrax Gel FS on yhteensopiva kaikkien retraktiomateriaalien kanssa lukuun ottamatta niitä, jotka sisältävät epinefriiniä tai alumiinikloridia.

### **Vasta-aiheet:**

Ei tunnettuja.

### **Varoitukset:**

Vain paikalliseen intraoraaliseen käyttöön. Ei saa niellä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

### **Varotoimet:**

- Vain ammattikäyttöön hammashoitovastaanotoilla.
- Älä käytä potilailla, joilla on allergia ferrisulfaatille.
- Suositellaan suuritehoisen imulaitteen käyttöä mahdollisen nielemisen välttämiseksi.
- Kudosten tilapäistä värjäytymistä voi esiintyä. Värjäytymisen tulisi kestää enintään 24–48 tuntia.
- Älä käytä Retrax Gel FS -geeliä yhdessä epinefriiniä sisältävien tuotteiden kanssa.
- Purkin sisältö tulee käyttää 90 päivän kuluessa avaamisesta.

### **Annostus:**

Käytä tarpeen mukaan hemostaasin saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

### **Käyttöohjeet:**

- Poista ja hävitä purkin foliotiiviste. Vaahtovuoren tulee jäädä korkin sisään, jotta purkki sulkeutuu kunnolla ja geeli säilyy käyttöjen välillä.
- Retrax Gel FS tulee sekoittaa ennen jokaista käyttökertaa.
- Levitä geeli varovasti suoraan ientaskualueelle.
- Valitse retraktiolanka ja pakkaa se geeliin.
- Vaihtoehtoisesti pieni määrä geeliä voidaan annostella, ja retraktiolanka voidaan kasta geeliin ennen sen pakkaamista ientaskuun.
- Odota 1–3 minuuttia.
- Jos verenvuoto jatkuu, huuhtelee alue ja levitä geeli uudelleen. Odota 1–3 minuuttia.
- Poista lanka.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi huuhtelee ja kuivaa käsittelyalue huolellisesti.
- Ota jäljennös normaalisti.

Käyttöturvallisuustiedote (SDS) on saatavilla yrityksen verkkosivuilta osoitteessa [pascaldental.com](http://pascaldental.com) tai ottamalla yhteyttä Pascal.

Pascal's Retrax Gel FS ei sisällä gluteenia, soijaa, maitoa, kananmunaa, maapähkinää eikä pähkinöitä. Retrax Gel FS ei sisällä keinotekoisia väri- tai makuaineita.

Pascal International, Inc.  
2929 Northup Way  
Bellevue, WA USA 98004  
425.827.4694 • 800-426-8051  
[www.pascaldental.com](http://www.pascaldental.com)

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
EC REP