

Z-PRIME™ PLUS

Zirconia-Alumina-Metal Primer



BISCO:n Z-PRIME PLUS on yksikomponenttinen primeri, joka parantaa sidosta epäsuorien restoratiivisten materiaalien ja yhdistelmämuovisementtien välillä. Sitä voidaan käyttää ZrO₂- ja Al₂O₃-runkoisten kokokeramisten restauraatioiden ja metallirunkoisten töiden sekä yhdistelmämuovien ja juurikanavanastojen pintakäsittelyyn. Z-PRIME PLUS aikaansaa korkean sidoslajuuden sekä kemiallis- että valokovetteisena.




AINUTLAATUISET EDUT

- Erinomainen sidoslajuus zirkonia-, alumiinioksidi- sekä metallirunkoisiin restauraatioihin.
- Sopii käytettäväksi sekä valo- että kemialliskovetteisten resiinisementtien kanssa.
- Kestävä ja soveltuu käytettäväksi monien materiaalien kanssa. Voidaan käyttää myös suussa tehtävissä korjauksissa.
- Miellyttävä, yhden pullon järjestelmä mahdollistaa helpon annostelun.
- Parantaa merkittävästi toisten resiinisementtien lujuutta.

Eri zirkoniaprimereiden keskimääräinen sidoslajuus valmistajien vastaavien sementtijärjestelmien kanssa. Tieto saatavissa BISCO Inc.

KÄYTTÖOHJE

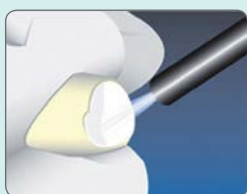

1) Puhdista restauraation sisäpinta, huuhtele ja kuivaa.



2) Annostelee 1–2 kerrosta Z-Prime Plusaa tasaisesti koko sisäpinnalle.



3) Ilmakuivaa 3–5 sekuntia. Jatka sementointia annostelemalla kiinnityssementti (esim. Duo-Link).

KLIININEN MERKITYS

- Parantaa merkittävästi sidoslajuutta zirkoniaan, alumiinioksidiin ja eri metalleihin. Selvästi enemmän kuin muut pintakäsittelyyn tarkoitetut primerit.
- Mahdollistaa luotettavan sidoksen moninaisten epäsuorassa tekniikassa käytettävien materiaalien kanssa.

PAKKAUSKOOT

tuotenro

34695 **Z-PRIME PLUS** (4 ml)

käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedote

valmistajan koodi

B-6001



HAMMASVÄLINE