

SELECT HV™ ETCH

35 % korkeaviskositeettinen fosforihappo-etsausaine dentiinille ja kiilteelle



Select HV Etch on erinomainen 35 % korkeaviskositeettinen fosforihappoetsausaine. Sillä käsitellään hampaan pinta ennen sidostamista, yhdistelmämuovia tai pinnoitetta. Select HV Etch on erityisesti suunniteltu maksimaaliseen työskentely ja käsittely mukavuuteen, vientiin pienille alueille ja eliminoimaan valumisen okklusaalipinnalle.

Select HV Etchin tarkka annostelu kiilteelle.
Kuva Dr. Michael Morgan



AINUTLAATUISET EDUT

- tiksotrooppinen
- huuhtoutuu pois helposti eikä jätä jäännösmateriaalia
- taloudellinen ruiskupakkaus

KLIININEN MERKITYS

Select HV Etch soveltuu erittäin hyvin ”hybriditeknikkaan”.

- Etsaa kiilteen reunat ilman dentiinin etsaantumista. Tämä on toivottavaa kun etsataan kiillettä ennen itse-etsaavia sidosaineita tai kun halutaan välitön dentiinisuoja.
- Leikkaamattoman kiilteen etsaaminen Select HV Etchillä parantaa merkittävästi etsausta ja sidostettua pintaa.

KÄYTTÖINDIKAATIOT

SELECT HV™ ETCH

35 % korkeaviskositeettinen fosfori-etsausaine dentiinille ja kiilteelle

Dentiinin ja kiilteen etsaus: 15 sekuntia
Selektiivinen kiilteen etsaus: 15 sekuntia
Hammaslääketieteellisten aineiden puhdistus: 30 sekuntia

PAKKAUSKOOT

tuotenro		valmistajan koodi
36607	Select HV Etch -setti 1 ruisku Select HV Etch (40 ml), 30 kertakäyttöistä ruiskua, 30 kertakäyttöistä kärkeä, käyttöohje, käyttöturvallisuustiedote.	E-59100K
36608	Select HV Etch 1 jättiruisku (40 ml), käyttöohje, käyttöturvallisuustiedote.	E-59060P
36609	Select HV Etch , 4 ruiskua (à 5 g), 50 kertakäyttöistä ruiskun kärkeä, käyttöohje/käyttöturvallisuustiedote.	E-59010P
30693	Tyhjät täyttöruiskut -pakkaus 30 kertakäyttöistä ruiskua, 30 kertakäyttöistä kärkeä.	X-80580P
87086	50 tumman sinistä kertakäyttöistä ruiskun kärkeä (22G)	X-80608N



HAMMASVÄLINE